


Entwickelt, um das Ansatzstück von kompatiblen IV Kathetern zu fixieren.

## Vorgehensweise zur Anbringung

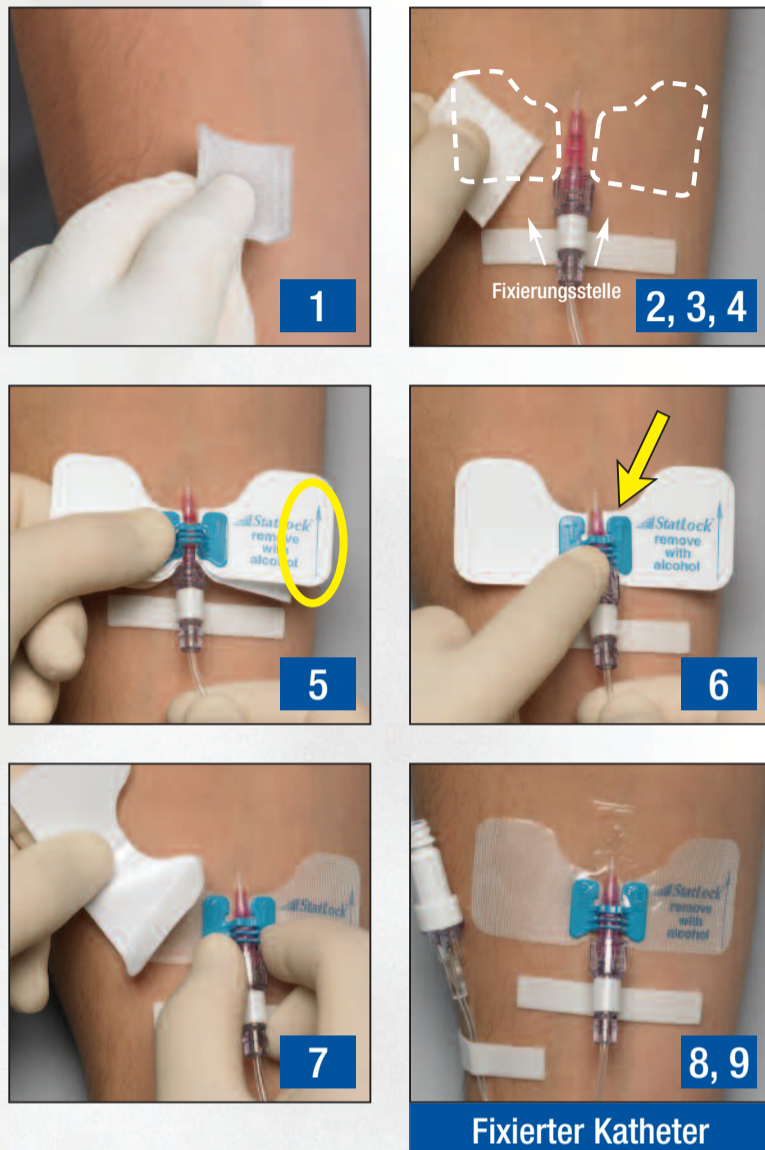

### Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep<sup>®</sup> Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten.  
**Vollständig trocknen lassen.**
2. Katheter platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Sicherstellen, dass das Plastikstück am Katheteransatz nach oben zeigt. Als Option für eine zwischenzeitliche Sicherung kann, wie gezeigt, ein Klebestreifen angebracht werden, um einen Zug am Katheter nach unten zu vermeiden.
4. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen.  
**Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**


### Ankoppeln

5. Das StatLock<sup>®</sup> Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
6. Das StatLock<sup>®</sup> Stabilisierungssystem über den Katheteransatz drücken, damit es das Plastikstück aufnimmt.

### Abziehen & Anbringen

7. Die Halterung des StatLock<sup>®</sup> Stabilisierungssystems fixieren, während die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abgezogen werden. Dann auf der Haut anbringen.
8. Einen transparenten Verband über der Eintrittsstelle anbringen.
9. Optional: Einen sterilen Klebestreifen so über dem Schlauch des Verlängerungssets anbringen, dass ein J-Bogen geformt wird.

## Vorgehensweise zur Entfernung

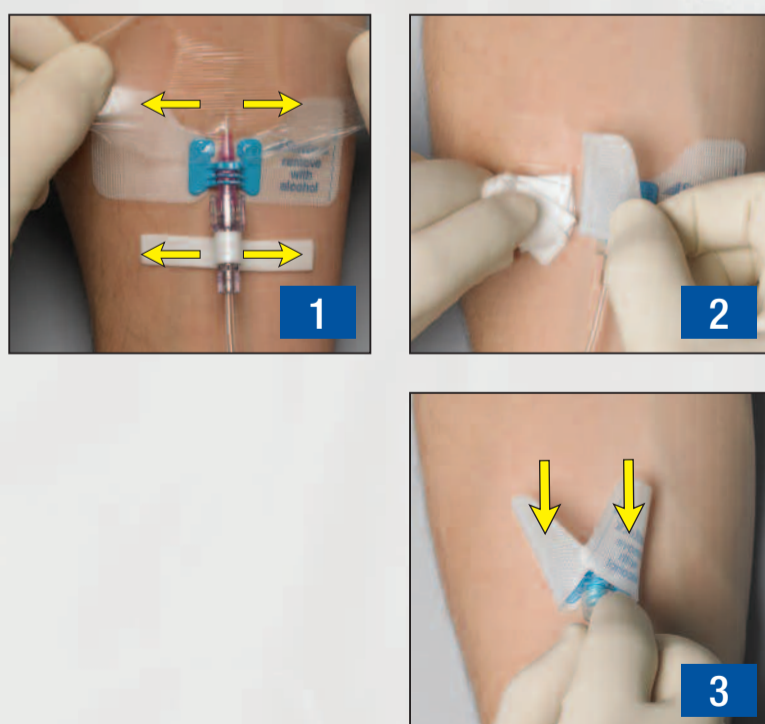

### Entfernen

1. Den transparenten Verband und Klebestreifen mittels Zugtechnik entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.  
**Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

### Entkoppeln

3. IV Katheter entfernen.

StatLock<sup>®</sup> Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock<sup>®</sup> Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

StatLock<sup>®</sup> Vorrichtungen sind steril und latexfrei.