

Entwickelt, um das Ansatzstück von kompatiblen IV Kathetern zu fixieren.




## Vorgehensweise zur Anbringung

### Abwischen

Bevor das StatLock\* Stabilisierungssystem angebracht werden kann, muss die Hautoberfläche vollständig trocken und frei von Ölen/weichmachenden Mitteln sein.

### Frühgeburten

1. Wasser und Seife verwenden, um die Haut zu reinigen und zu entfetten.

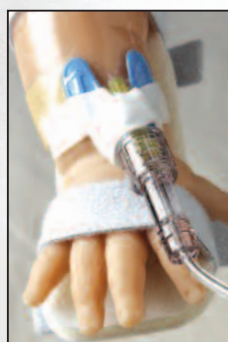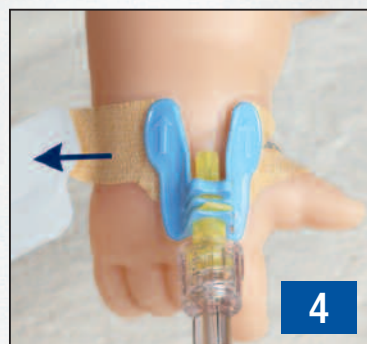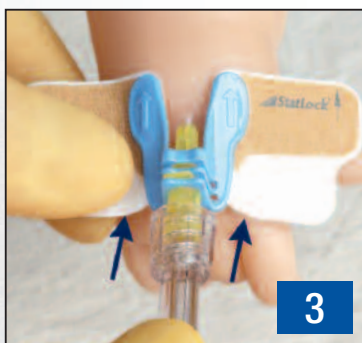

Entsprechend dem Protokoll und der Prozedur immobilisieren

2. Die Fixierungsstelle mit dem beiliegenden Sali-Wipe\* Tupfer abwischen. Dieses enthält normale sterile Kochsalzlösung. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

### Normale Geburten

1. Alkohol verwenden, um die Haut zu reinigen und zu entfetten.
2. Den beiliegenden Apicare\* Tupfer auf der Fixierungsstelle anwenden. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

**HINWEIS: Den Katheter stets in der StatLock\* Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.**

### Ankoppeln

3. Den Katheter so positionieren, dass das Plastikstück am Katheteransatz nach oben zeigt. Das StatLock\* Stabilisierungssystem so ausrichten, dass die Pfeile zur Katheterspitze zeigen. Das StatLock\* Stabilisierungssystem über den Katheteransatz drücken, damit es das Plastikstück aufnimmt.



### Abziehen & Anbringen

4. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
5. Auf der Haut anbringen.

### Schutz

6. Sie können entscheiden, die Eintrittsstelle und das StatLock\* Stabilisierungssystem mit einem transparenten Verband abzudecken.
7. Um die Kanten der Halterung abzupolstern, den beiliegenden Klebestreifen unter die Kanten der Halterung des StatLock\* Stabilisierungssystems schieben. Dann die Halterung einwickeln.

## Vorgehensweise zur Entfernung

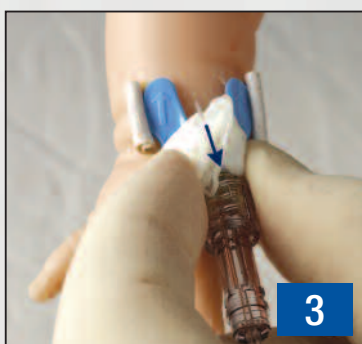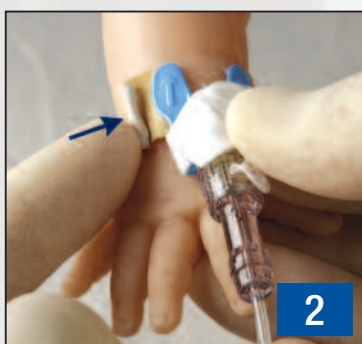

### Entfernen

1. Den transparenten Verband und den gewickelten Klebestreifen mittels Zugtechnik entfernen.
2. Beide Seiten des StatLock\* Pflasters nacheinander aufrollen.

### Entkoppeln

3. Zum Entfernen des IV Katheters, StatLock\* Stabilisierungssystem und Katheter zusammen entfernen.

**Falls Sie Schwierigkeiten beim Entfernen des StatLock\* Pflasters feststellen, das Entfernen sofort stoppen. Unter Verwendung eines auf Öl basierenden Pflasterentferners fortfahren. Alkohol wird nicht benötigt, um das StatLock\* IV Ultra Neonatal Stabilisierungssystem zu entfernen.**

StatLock\* Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock\* Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

StatLock\* Vorrichtungen sind steril und latexfrei.