


Vorgehensweise zur Entfernung

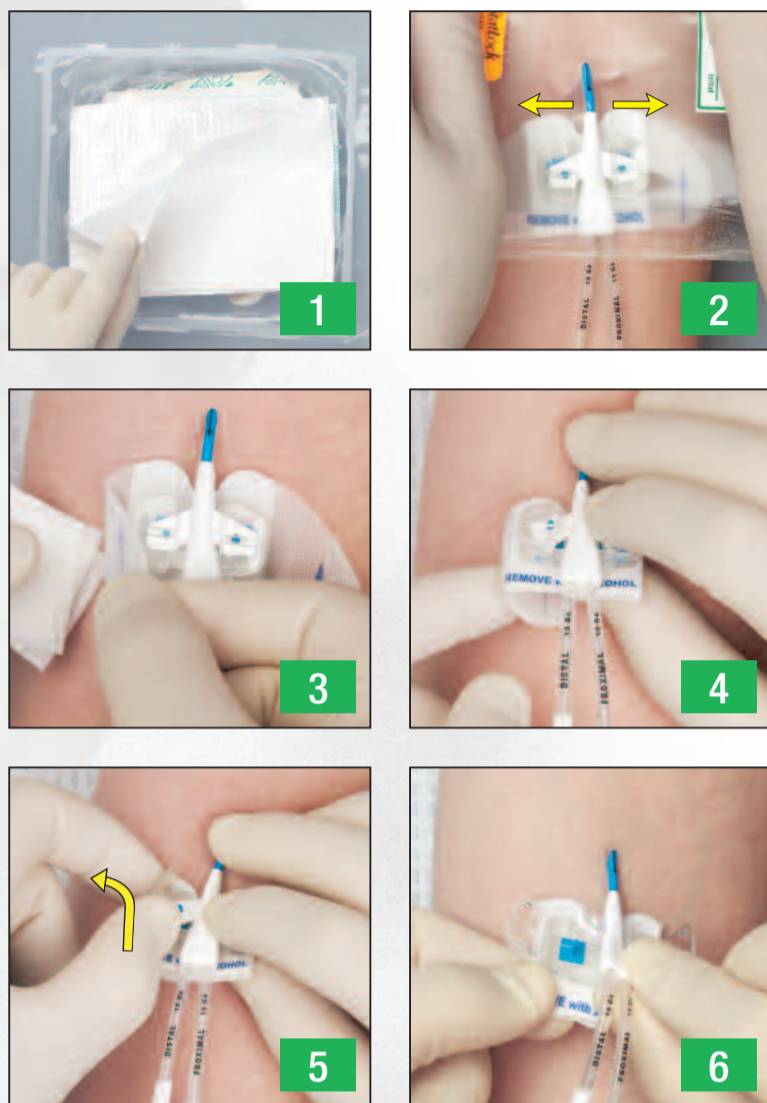

Vorbereitung

1. Benötigte Materialien bereitlegen und steriles Feld entsprechend dem Krankenhausprotokoll vorbereiten.
2. Mit unsterilen Handschuhen den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.

Entfernen

3. Unter Verwendung von sterilen Handschuhen und aseptischen Bedingungen eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.
Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.


HINWEIS: Um den Katheter aus silikonfreiem Material zwischenzeitlich zu fixieren, kann ein steriler Klebestreifen verwendet werden. Vor dem Reinigen der Eintrittsstelle entfernen.

4. Pflaster, wie gezeigt, nach unten falten.

Entkoppeln

5. Den Katheter mit dem Finger stabilisieren, während das StatLock* Stabilisierungssystem gehalten wird. Als nächstes, wie gezeigt, mit dem Daumen der zweiten Hand die Tür der Halterung vorsichtig öffnen.
Die Hände neu positionieren und den Vorgang mit der zweiten Tür wiederholen.
6. PICC vorsichtig aus der Halterung herausnehmen.

Vorgehensweise zur Anbringung

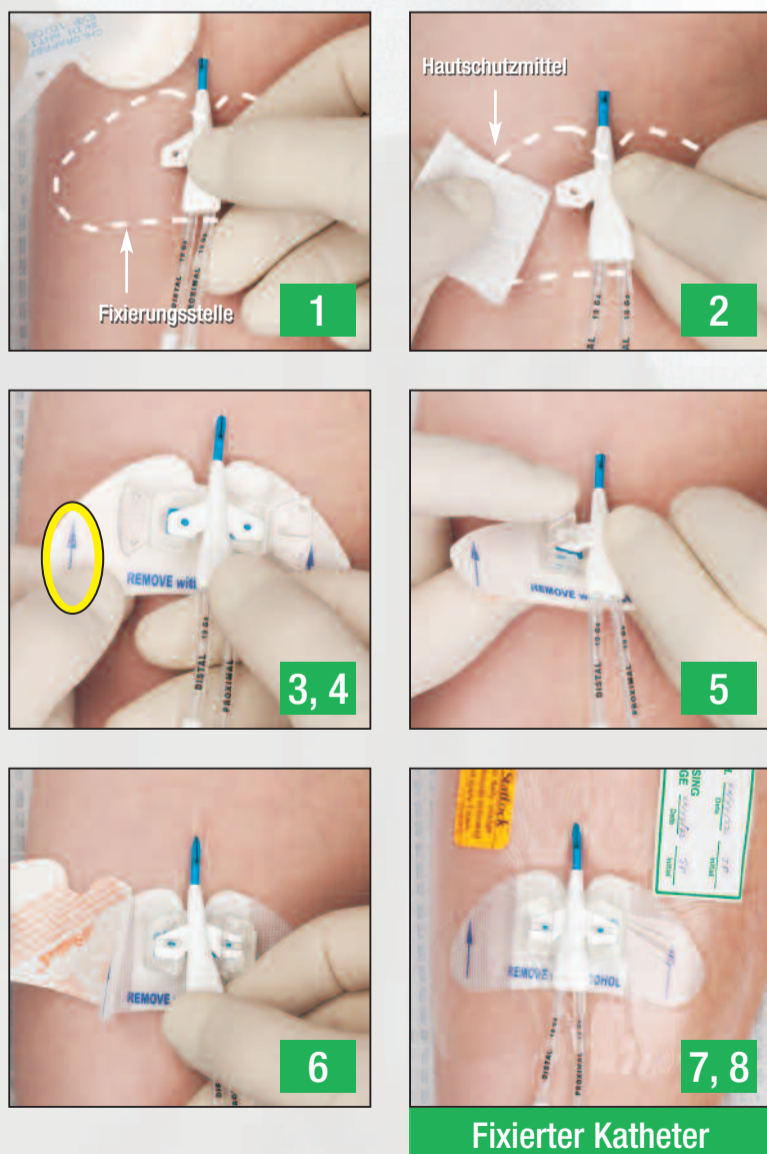

Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep* Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen.
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen.
Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).

Ankoppeln

3. Das StatLock* Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
4. **Version mit variablen Haltezapfen**
Erstes Nahtloch des Nahtflügels über dem ersten Haltezapfen platzieren, dann den Katheter mit dem Haltezapfen verschieben, um den zweiten Haltezapfen einzufangen.
- Version mit fixierten Haltezapfen**
Die Nahtlöcher des Nahtflügels über den fixierten Haltezapfen platzieren.
5. Das Pflaster von unten unterstützen und die Türen der Halterung schließen.

Abziehen & Anbringen

6. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen. Dann auf der Haut anbringen.
7. Transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen..
8. Beiliegendes Label anbringen.

Fixierter Katheter

StatLock* Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock* Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebepflaster oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

StatLock* Vorrichtungen sind steril und latexfrei.