

Das gepulste Simpulse\* SOLO Spülsystem ist in einer Reihe praktischer Kits erhältlich:


Verpackungseinheit pro Artikel: 10 Stück

Mindestbestellmenge entspricht der Verpackungseinheit.

Simpulse* SOLO Absaug-/Spülsystem	0067570
Simpulse* SOLO System mit weichem Spritzschutz, Absaugschlauch und Doppeldornadapter	0067590
Simpulse* SOLO System mit Duschkopf, Absaugschlauch und Doppeldornadapter	0067600
Simpulse* SOLO System mit zurückziehbarem Ultrex* Spritzschutz (Durchmesser 4,38 cm), Absaugschlauch und Doppeldornadapter	0067700

### Davol Simpulse\* SOLO ZUBEHÖR

		0057631
		0067740
		0067750
		0067910

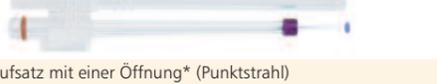	0067621
	0067651
	0067661
	067671
	0067681

	0067710
	0067720
	0067730
	0037630
	0037640
	0037740
	0037690



**BARD**

[www.bard.de](http://www.bard.de)

C. R. BARD GmbH

Wachhausstrasse 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100

BARD MEDICA S.A.

Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70

BARD MEDICA S.A.

Thaliastrasse 125a/1/5 • A-1160 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

**BARD**

\* Bard, Davol, Simpulse und Ultrex sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. BARD, Inc. oder eines ihrer Tochterunternehmen. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Copyright © 2007 C. R. BARD, Inc. All Rights Reserved. BR0060H (10/2007)

# Simpulse\* SOLO

GEPULSTES SPÜLSYSTEM

## LEISTUNG

### Optimale Leistung und Kontrolle

- Leistungsregulierung über den Handgriff
- Spülfunktionen für viele chirurgische und klinische Anwendungen
- Quetschklemme am Handgriff zur Regulierung der Absaugung

### Ergonomisch geformter Handgriff

- Pistolenhandgriff zur Vermeidung von Handermüdung
- Arretierbarer Schalter für konstante Spülung auf höchster Stufe

### Große Auswahl an Aufsätzen

- Einzigartige Aufsatzkonfigurationen zur optimalen Reinigung
- Separater Absaug Schlauch zur Reduzierung der Verstopfungsgefahr
- Aufsätze mit zurückziehbarem Spritzschutz zur einfacheren Spülung

## EINFACHHEIT

### Einfache Inbetriebnahme und Verwendung

- Keine externe Stromquelle erforderlich
- Sofort einsatzbereit
- Auch als Set erhältlich

### Einfache Entsorgung

- System für den Einmalgebrauch
- Batteriefach lässt sich nach dem Gebrauch leicht aus dem Handgriff entfernen


## BEWÄHRTE LEISTUNG

- In einer vorangegangenen Studie<sup>1</sup> zeigte das Simpulse\* SOLO-System unter allen getesteten Systemen den höchsten Spitzendruck.
- Die Pulsfrequenz und die Flussrate des Simpulse\* SOLO Systems waren in dieser limitierten Studie höher als bei allen anderen getesteten Systemen.

Gerät	Durchschnittlicher Druck (g)				Frequenz Pulse/s	Flussrate ml/Min.
	2,5 cm Abstand		10 cm Abstand			
	Obere Spitze	Untere Spitze	Obere Spitze	Untere Spitze		
Davol* Simpulse* Solo	192	0	207	0	34	1290
Stryker* Surgilav* Plus	123	0	108	0	14	900
Stryker* InterPulse* <sup>2</sup>	84	0	32	0	18	670
Zimmer* Pulsavac*	48	33	43	33	26	910
Zimmer* Var-A-Pulse*	92	0	102	0	14	500

<sup>1</sup> "Pulsatile Lavage Irrigators: Comparative Evaluation of Impulse Pressures", CITECH, ©1998  
<sup>2</sup> Daten liegen vor, Davol Inc.

Ungehindertes Sauglumen für optimale Absaugleistung bei minimierter Verstopfungsgefahr

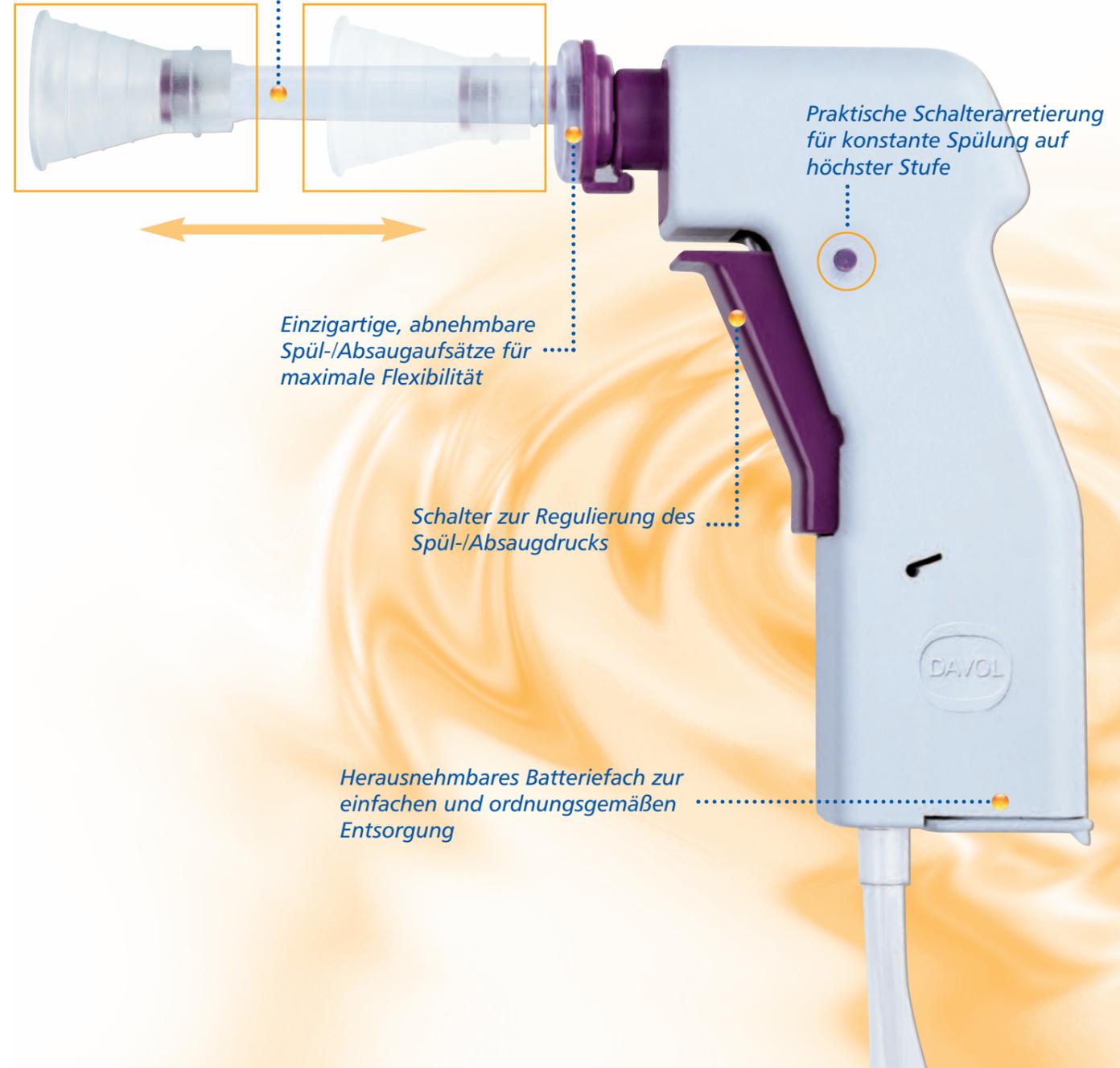

EIN GEPULSTES SPÜLSYSTEM, DAS TECHNISCH EINFACH AUSGEREIFTER IST

**BARD**