

# STATLOCK® Arterial Select

Stabilisierungssysteme

**StatLock®**  
STABILISIERUNGSSYSTEM

## Vorgehensweise zur Anbringung



Fixierter Katheter

Falls gewünscht, einen Klebestreifen über dem Katheteransatz platzieren.

### Abwischen

1. Bereiten Sie die Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll vor, um die Haut zu entfetten und eventuell vorhandenes Betadine zu entfernen.
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

**HINWEIS:** Den Katheter stets in der STATLOCK® Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.

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
### Ankoppeln

3. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass die Pfeile zur Eintrittsstelle zeigen.
4. Die Halterung nahe dem drehbaren Lock-Teil über den Luer-Teil des Verlängerungssets drücken, um den Schlauch festzusetzen.

### Abziehen & Anbringen

5. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
6. Auf der Haut anbringen.

## Vorgehensweise zur Entfernung



### Entfernen

1. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.  
**Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

### Entkoppeln

2. Den Schlauch vom STATLOCK® Stabilisierungssystem entkoppeln.
3. Mit dem Entfernen des Klebepflasters mit Alkohol fortfahren.  
**Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

**C. R. Bard GmbH**  
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

**Bard Medica S.A.**  
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

**Bard Medica S.A.**  
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.  
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0220-D (07/2014)

STATLOCK® Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. STATLOCK® Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.  
STATLOCK® Vorrichtungen sind steril & latexfrei.