

Vorgehensweise zur Anbringung

Den Katheter entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers platzieren.

Abwischen

1. Bereiten Sie die Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll vor, um die Haut zu entfetten und eventuell vorhandenes Betadine zu entfernen.
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

Ankoppeln


3. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem unter den Nahtflügel des Katheters schieben und die Nahtlöcher über den Haltezapfen platzieren. Die Türen der Plastikhalterung nacheinander schließen.

HINWEIS: Den Katheter stets in der STATLOCK® Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.

Abziehen & Anbringen

4. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
5. Auf der Haut anbringen. Wenn verfügbar das Haltekissen für die externen Schenkel verwenden, um die baumelnden Anschlüsse zu fixieren.

Falls noch nicht geschehen, einen transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.

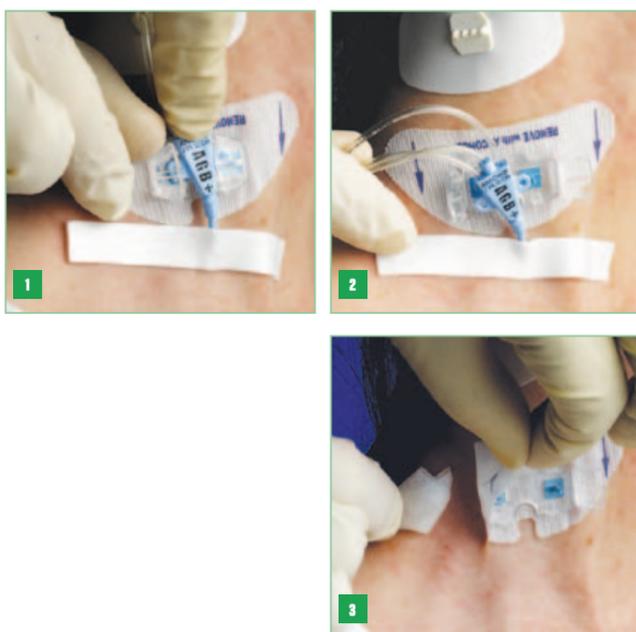

Vorgehensweise zur Entfernung

HINWEIS: Bevor das STATLOCK® Stabilisierungssystem entfernt wird immer einen sterilen Klebestreifen bei oder nahe der Kathetereintrittsstelle anbringen.

Entkoppeln

1. Den Katheter durch vorsichtiges, nacheinander Öffnen der Plastiktüren entkoppeln.
2. Wenn zweckdienlich, den Katheter vorsichtig aus der Halterung herausnehmen.

Entfernen

3. Das Stabilisierungspflaster entfernen indem eine großzügige Menge Alkohol verwendet wird, um eine Ecke des Pflasters zu lösen. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlangstreichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.

Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.