



Fixierter Katheter

## Vorgehensweise zur Anbringung

Falls gewünscht, einen Klebestreifen über dem Katheteransatz platzieren.

### Abwischen

1. Bereiten Sie die Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll vor, um die Haut zu entfetten und eventuell vorhandenes Betadine zu entfernen.
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen.  
**Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

**HINWEIS: Den Katheter stets in der STATLOCK® Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.**

### Ankoppeln

- 3a. **Für Katheter mit Nahtflügel:**  
STATLOCK® Stabilisierungssystem unter den Nahtflügel schieben und Nahtlöcher über den Haltezapfen platzieren.
- 3b. **Für perkutane Einführschleusen:**  
STATLOCK® Stabilisierungssystem unter das Einführbesteck schieben und ein Nahtloch über einen Haltezapfen schieben; dabei den Schlauch zwischen Haltezapfen und Band platzieren (wie gezeigt).
4. Kappen auf die Haltezapfen pressen bis sie einrasten.

### Abziehen & Anbringen

5. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
- 6/6a. Auf der Haut anbringen.

## Vorgehensweise zur Entfernung

**HINWEIS: Bevor das STATLOCK® Stabilisierungssystem entfernt wird immer einen sterilen Klebestreifen bei oder nahe der Kathetereintrittsstelle anbringen.**

### Entkoppeln

1. Vorsichtig die Kappen von den Haltezapfen lösen.
2. Katheter oder Einführschleuse aus den Haltezapfen herausheben.

### Entfernen

3. Eine großzügige Menge Alkohol verwenden, um eine Ecke des Pflasters zu lösen. Die Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlangstreichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.  
**Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

