


METHODE 1 – Transparenter Verband zuerst

Entwickelt, um das Ansatzstück von kompatiblen IV Kathetern zu fixieren.

Vorgehensweise zur Anbringung

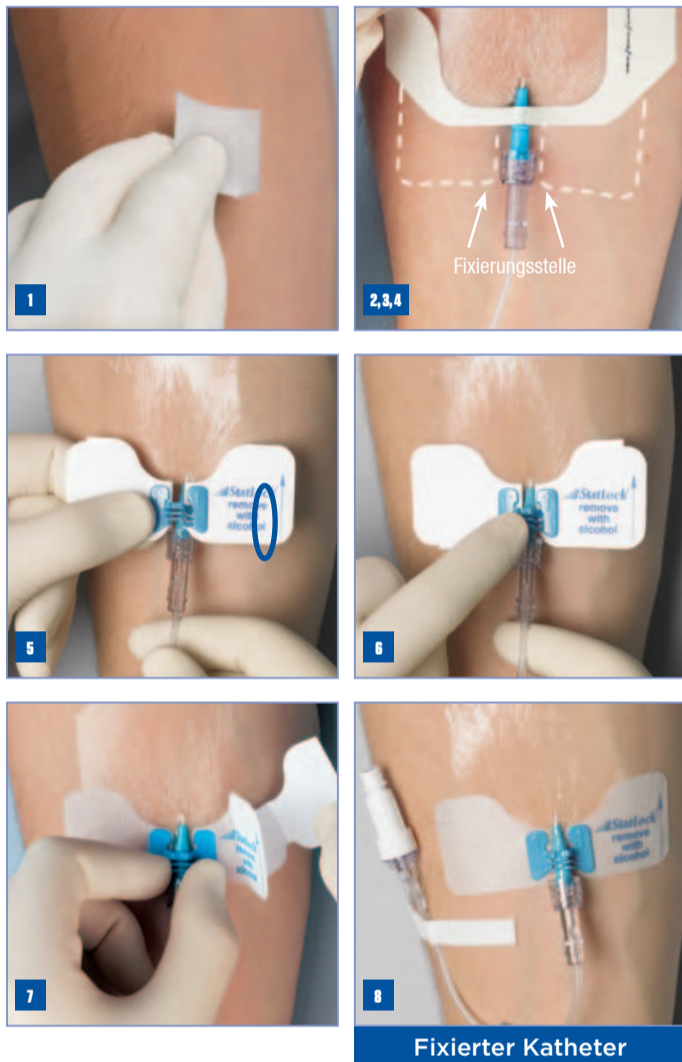

Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Katheter platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Sicherstellen, dass das Plastikstück am Katheteransatz nach oben zeigt. Danach den transparenten Verband über der Eintrittsstelle bis zum Plastikstück am Katheteransatz anbringen. **Das Plastikstück nicht mit dem transparenten Verband abdecken.**
4. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).** Hautschutzmittel nicht über dem transparenten Verband anwenden.


Ankoppeln

5. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
6. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem über den Katheteransatz drücken, damit es das Plastikstück aufnimmt.

Abziehen & Anbringen

7. Die Halterung des STATLOCK® Stabilisierungssystems fixieren, während die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abgezogen werden. Dann auf der Haut anbringen.
8. Optional: Einen sterilen Klebestreifen so über dem Schlauch des Verlängerungssets anbringen, dass ein J-Bogen geformt wird.

Vorgehensweise zur Entfernung

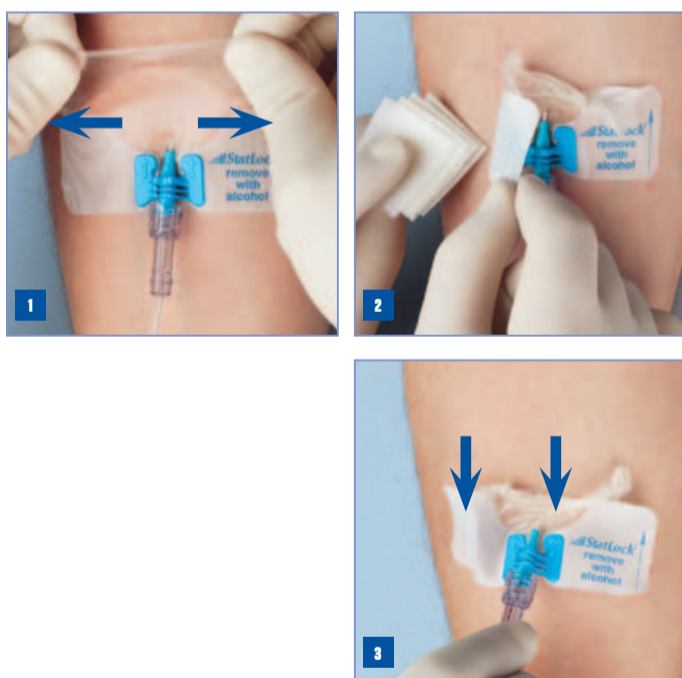

Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik bis zum STATLOCK® Pflaster entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

Entkoppeln

3. IV Katheter entfernen.