


STATLOCK® IV Ultra Neonatal

Stabilisierungssysteme

StatLock®
STABILISIERUNGSSYSTEM

Entwickelt, um das Ansatzstück von kompatiblen IV Kathetern zu fixieren.

Vorgehensweise zur Anbringung

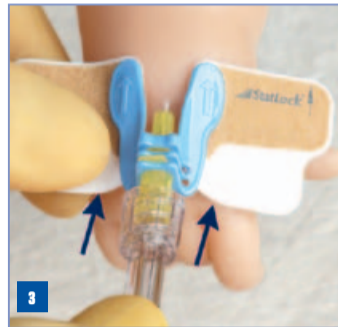

Abwischen

Bevor das STATLOCK® Stabilisierungssystem angebracht werden kann, muss die Hautoberfläche vollständig trocken und frei von Ölen/weichmachenden Mitteln sein.



► Frühgeburten

1. Wasser und Seife verwenden, um die Haut zu reinigen und zu entfetten.
2. Die Fixierungsstelle mit steriler Kochsalzlösung abwischen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

► Normale Geburten

1. Alkohol oder Chlorhexidin-Lösung verwenden, um die Haut zu reinigen und zu entfetten.
2. Den beiliegenden Hautschutz auf der Fixierungsstelle anbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

HINWEIS: Den Katheter stets in der STATLOCK® Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.

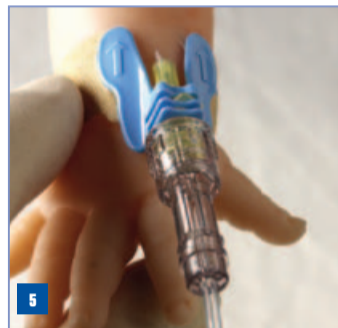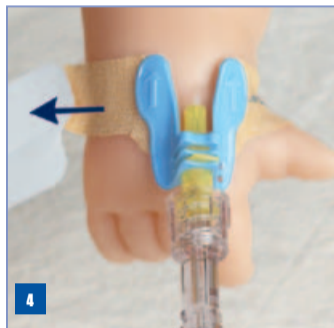

Ankoppeln

3. Den Katheter so positionieren, dass das Plastikstück am Katheteransatz nach oben zeigt. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass die Pfeile zur Katheterspitze zeigen. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem über den Katheteransatz drücken, damit es das Plastikstück aufnimmt.

Abziehen & Anbringen

4. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
5. Auf der Haut anbringen.

Schutz

6. Sie können entscheiden, die Eintrittsstelle und das STATLOCK® Stabilisierungssystem mit einem transparenten Verband abzudecken.
7. Um die Kanten der Halterung abzupolstern, den beiliegenden Klebestreifen unter die Kanten der Halterung des STATLOCK® Stabilisierungssystems schieben. Dann die Halterung einwickeln.



Entsprechend
Protokoll & Prozedur
immobilisieren

Vorgehensweise zur Entfernung



Entfernen

1. Den transparenten Verband und den gewickelten Klebestreifen mittels Zugtechnik entfernen.
2. Beide Seiten des STATLOCK® Pflasters nacheinander aufrollen.

Entkoppeln

3. Zum Entfernen des IV Katheters, STATLOCK® Stabilisierungssystem und Katheter zusammen entfernen.

Falls Sie Schwierigkeiten beim Entfernen des STATLOCK® Pflasters feststellen, **das Entfernen sofort stoppen**. Unter Verwendung eines auf Öl basierenden Pflasterentferners fortfahren. Alkohol wird nicht benötigt, um das STATLOCK® IV Ultra Neonatal Stabilisierungssystem zu entfernen.



C. R. Bard GmbH
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

Bard Medica S.A.
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0180-D (07/2014)

STATLOCK® Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. STATLOCK® Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebebander oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren. STATLOCK® Vorrichtungen sind steril & latexfrei.