


# STATLOCK® IV Select

Stabilisierungssysteme

**StatLock®**  
STABILISIERUNGSSYSTEM

Entwickelt, um den Luer-Lock Ansatz des beiliegenden IV Verlängerungssets zu fixieren.

## Vorgehensweise zur Anbringung

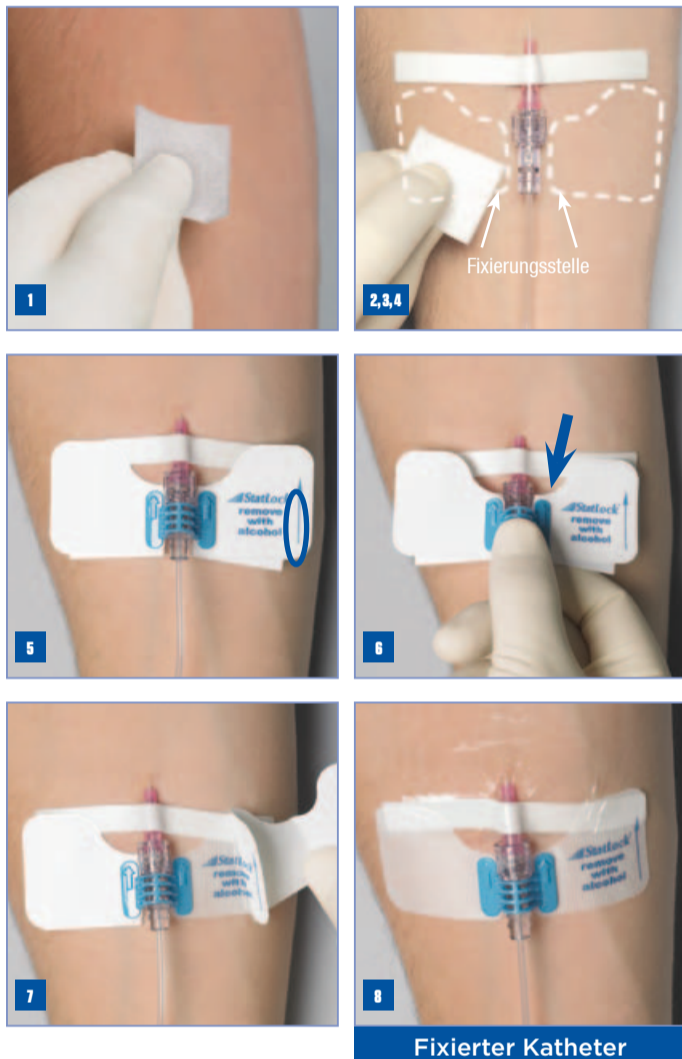

### Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Katheter platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Sterilen Klebestreifen und/oder transparenten Verband anbringen, um den Katheter zu stabilisieren.
4. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**


### Ankoppeln

5. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
6. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem über den Luer-Lock Ansatz des Verlängerungssets drücken, dabei gleichzeitig das Verlängerungsset von unten unterstützen.
7. Sicherstellen, dass die Halterung direkt hinter dem Luer-Lock sitzt, damit der Katheter richtig gesichert ist.

### Abziehen & Anbringen

8. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen. Dann auf der Haut anbringen.
9. Wenn noch nicht geschehen, einen transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.

## Vorgehensweise zur Entfernung

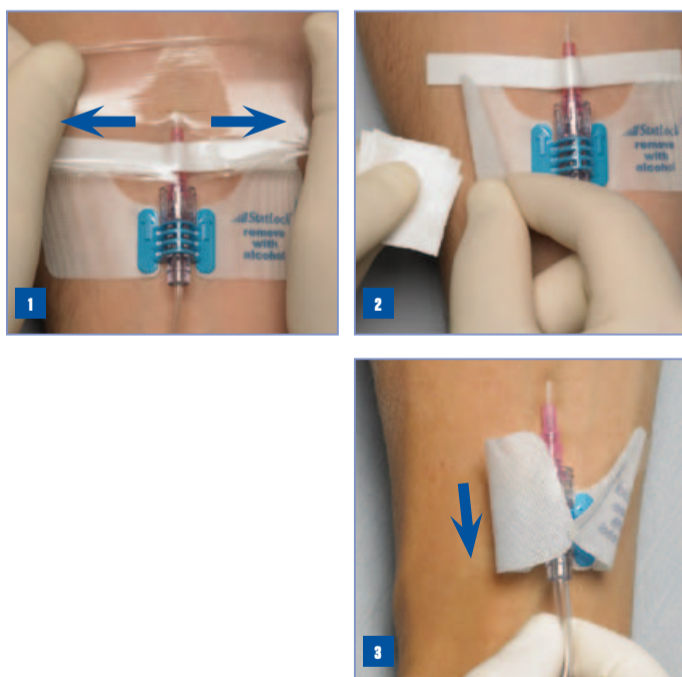

### Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**
3. Klebestreifen durch Anwendung der Zugtechnik entfernen.

### Entkoppeln

4. IV Katheter entfernen.

C. R. Bard GmbH  
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

Bard Medica S.A.  
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.  
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.  
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0150-D (07/2014)

STATLOCK® Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. STATLOCK® Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.  
STATLOCK® Vorrichtungen sind steril & latexfrei.

**BARD | MEDICAL**