
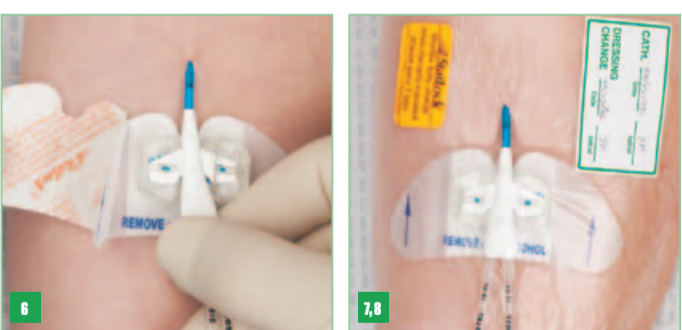
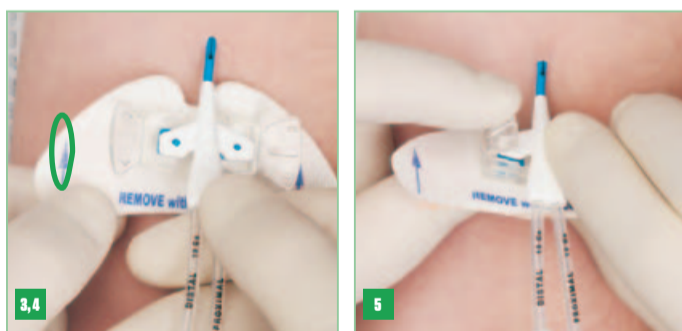
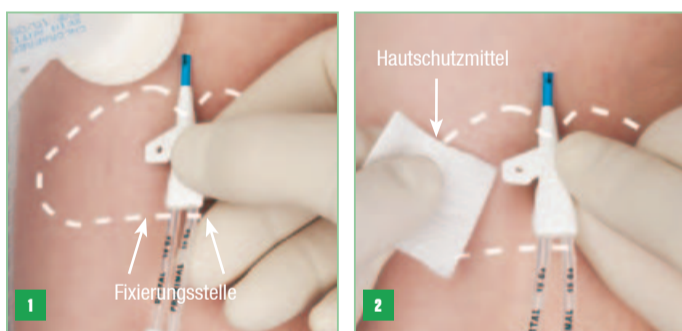
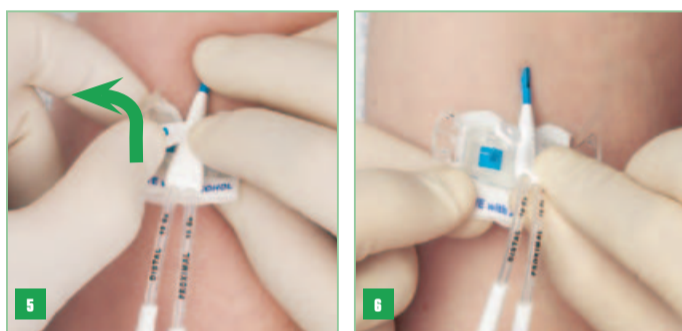
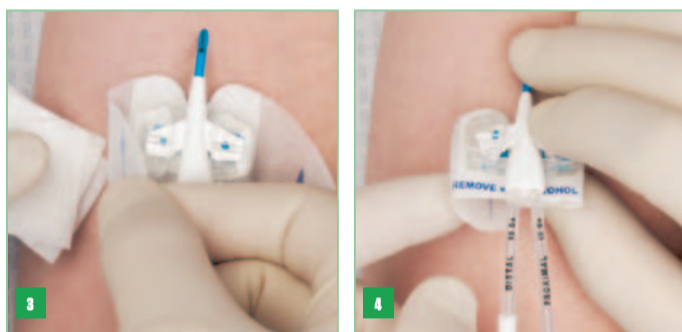


## TECHNIK zum Verbandwechsel

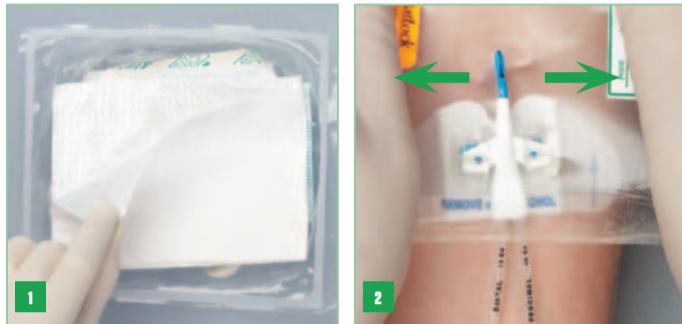

Fixierter Katheter

### Vorgehensweise zur Entfernung

#### Vorbereiten

1. Benötigte Materialien bereitlegen und steriles Feld entsprechend dem Krankenhausprotokoll vorbereiten.
2. Mit unsterilen Handschuhen den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.

#### Entfernen

3. Unter Verwendung von sterilen Handschuhen und aseptischen Bedingungen eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.

**Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

**HINWEIS: Um den Katheter aus silikonfreiem Material zwischenzeitlich zu fixieren, kann ein steriler Klebestreifen verwendet werden. Vor dem Reinigen der Eintrittsstelle entfernen.**

4. Pflaster, wie gezeigt, nach unten falten.

#### Entkoppeln

5. Den Katheter mit dem Finger stabilisieren, während das STATLOCK® Stabilisierungssystem gehalten wird. Als nächstes, wie gezeigt, mit dem Daumen der zweiten Hand die Tür der Halterung vorsichtig öffnen. **Die Hände neu positionieren und den Vorgang mit der zweiten Tür wiederholen.**
6. PICC vorsichtig aus der Halterung herausnehmen.

### Vorgehensweise zur Anbringung

#### Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen.
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

#### Ankoppeln

3. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
4. **Version mit variablen Haltezapfen:** Erstes Nahtloch des Nahtflügels über dem ersten Haltezapfen platzieren, dann den Katheter mit dem Haltezapfen verschieben, um den zweiten Haltezapfen einzufangen.  
**Version mit fixierten Haltezapfen:** Die Nahtlöcher des Nahtflügels über den fixierten Haltezapfen platzieren.
5. Das Pflaster von unten unterstützen und die Türen der Halterung schließen.

#### Abziehen & Anbringen

6. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen. Dann auf der Haut anbringen.
7. Transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.
8. Beiliegendes Label anbringen.

C. R. Bard GmbH  
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

Bard Medica S.A.  
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.  
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.  
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0250-D (07/2014)