


HINWEIS: Während der Pflege von zentralvenösen Zugängen und dem Anbringen oder Entfernen von STATLOCK® Stabilisierungssystemen wird immer empfohlen:


1. Patient horizontal lagern.
2. Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um Zugkräfte auf den Katheter zu reduzieren.
3. Bei der Erstanlage einen sterilen Klebestreifen an oder nahe der Eintrittsstelle anbringen.

Vorgehensweise zur Anbringung

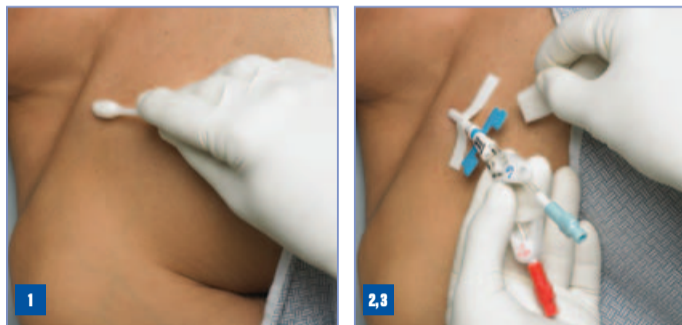


Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit ChloroPrep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Katheter platzieren und entsprechend der Gebrauchsanleitung des Herstellers vorgehen.
3. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

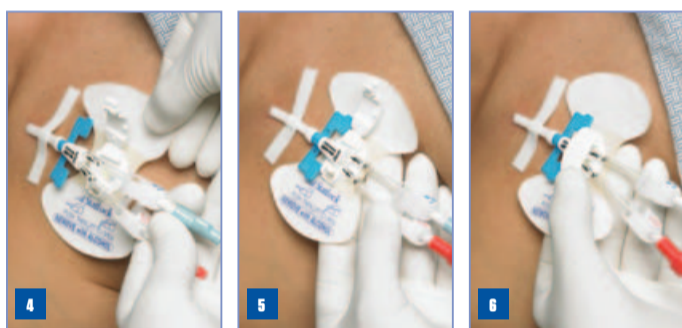

Ankoppeln

4. Den Katheter stets in der STATLOCK® Halterung sichern, **bevor** das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.
5. Die Bifurkation des Katheters in die Halterung des STATLOCK® Stabilisierungssystems einlegen.
6. Den Deckel schließen.

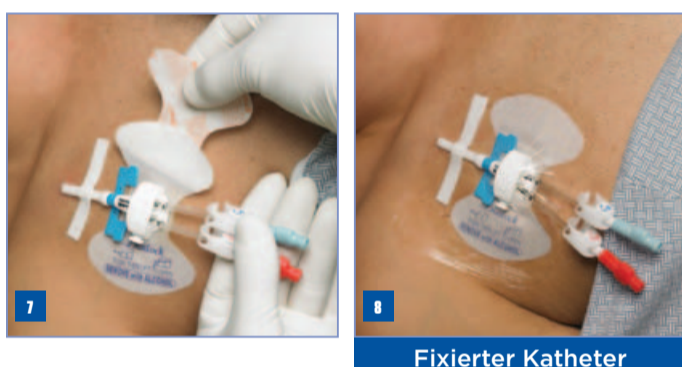


Abziehen & Anbringen

7. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen und auf der Haut anbringen.
8. Einen transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.

Fixierter Katheter

Vorgehensweise zur Entfernung

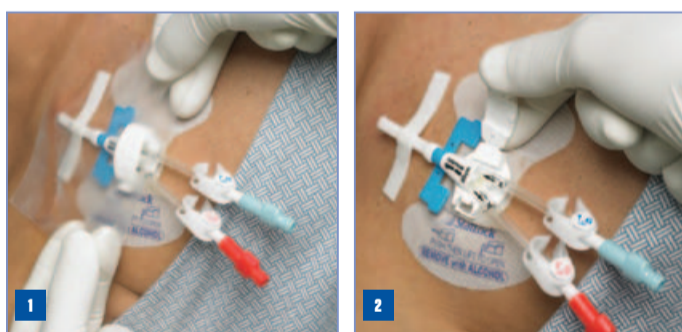

Bevor das STATLOCK® Stabilisierungssystem gewechselt wird, immer einen sterilen Klebestreifen bei oder nahe der Kathetereintrittsstelle anbringen.

Entkoppeln

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Die Halterung durch Drücken und Anheben des Freigabeknopfes mit dem Daumen öffnen.
3. Den Katheter vorsichtig aus der Halterung herausheben.



Entfernen

4. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

C. R. Bard GmbH
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

Bard Medica S.A.
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0100-D (07/2014)