

Entwickelt zur Fixierung von Adaptern von Epiduralkathetern auf dem Brustkorb.

Vorgehensweise zur Anbringung

Abwischen

1. Bereiten Sie die Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung oder Alkohol vor, um die Haut zu entfetten und eventuell vorhandenes Betadine zu entfernen. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

HINWEIS: Den Katheter und das Verlängerungsset stets in der STATLOCK® Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.

Ankoppeln

3. Den Luer-Ansatz des beiliegenden Verlängerungssets in die zentrale Halterung drücken.
4. Den Schlauch des beiliegenden Verlängerungssets in die dafür vorgesehene Halterung einlegen.
5. Den Epiduralkatheter durch die Haltezapfen fädeln (gezeigte Technik verwenden).

Abziehen & Anbringen

6. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
7. Auf der Haut anbringen.



1,2



Fixierter Katheter

Vorgehensweise zur Entfernung

Entkoppeln

Anterior Position

1. Schlauch, Luer-Ansatz und Epiduralkatheter aus den STATLOCK® Halterungen entfernen.

Entfernen

2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.
Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.



1



2