


STATLOCK® IV Elite

Stabilisierungssysteme

StatLock®
STABILISIERUNGSSYSTEM

Für B. Braun®, BD® und Smiths Medical Venenverweilkanülen.

Vorgehensweise zur Anbringung

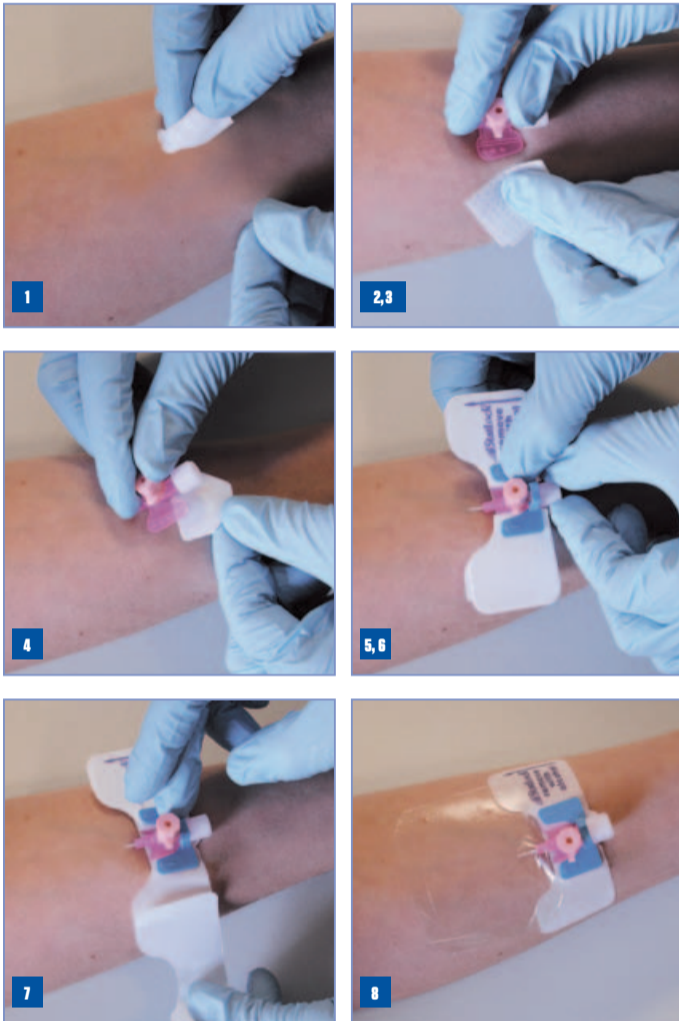

Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit ChloroPrep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Venenverweilkanüle platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**


Ankoppeln

4. Nachdem das Hautschutzmittel angetrocknet ist Schutzfolie entfernen und weißes Schaumstoffkissen unter dem Flügel und Luer-Ansatz platzieren.
5. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass die Pfeile zur Eintrittsstelle zeigen. Die Halterung des STATLOCK® Stabilisierungssystems über den Konnektoransatz der Venenverweilkanüle drücken und zwischen Injektionsport und Luer-Ansatz platzieren. Dabei gleichzeitig das Verlängerungsset von unten unterstützen.
6. Sicherstellen, dass die Halterung direkt hinter dem Luer-Lock sitzt, damit die Venenverweilkanüle richtig gesichert ist.

Abziehen & Anbringen

7. Die Halterung des STATLOCK® Systems festhalten und die Papierschicht auf der Rückseite abziehen. Dann auf der Haut anbringen.
8. Einen transparenten Verband über der Punktionsstelle anbringen.

Vorgehensweise zur Entfernung

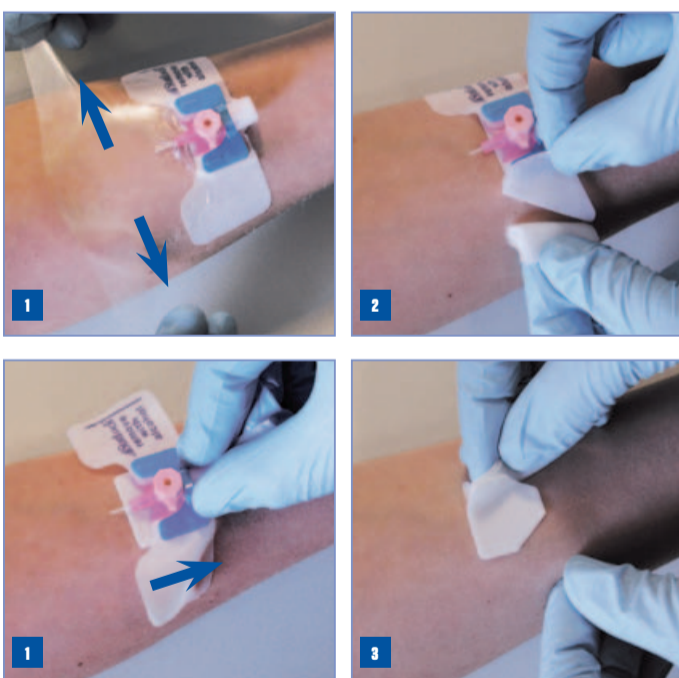

Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

Entkoppeln

3. Venenverweilkanüle entfernen.
4. Unter Verwendung von Alkoholtupfern auf die Unterseite des Schaumstoffkissens entlang streichen, um es von der Haut zu entfernen.

C. R. Bard GmbH
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

Bard Medica S.A.
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modocenterstraße 22 • A-1030 Wien
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

Bard Medica S.A.
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0310-D (07/2014)

STATLOCK® Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. STATLOCK® Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebepflaster oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.
STATLOCK® Vorrichtungen sind steril & latexfrei.