



Fixierter Katheter

Vorgehensweise zur Anbringung

Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten. **Vollständig trocknen lassen.**
Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**

HINWEIS: Den Katheter stets in der STATLOCK® Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.

Ankoppeln

2. Eine Doppelschleufe, durch Einfädeln beider STATLOCK® Bänder durch ihre jeweilige Halterung formen.
3. Den zu sichernden Katheter durch den durch die Doppelschleifen geformten Tunnel schieben.
4. Die Bänder des STATLOCK® Stabilisierungssystems um den Katheter vorsichtig zuziehen.

Abziehen & Anbringen

5. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
6. Auf der Haut anbringen.

Vorgehensweise zur Entfernung

Entkoppeln

1. Unter Verwendung einer Arterienklemme das Band des STATLOCK® Stabilisierungssystems an der Basis greifen und vorsichtig medial drehen, bis es abreißt. Mit dem zweiten Band wiederholen.
2. Vorsichtig den Schlauch aus dem STATLOCK® Verankerungskissen herausheben.

Entfernen

3. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.
Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.