


# STATLOCK® PICC Plus

Stabilisierungssysteme

**StatLock®**  
STABILISIERUNGSSYSTEM



Entwickelt, um kompatible PICC Katheter zu fixieren.

## Vorgehensweise zur Anbringung

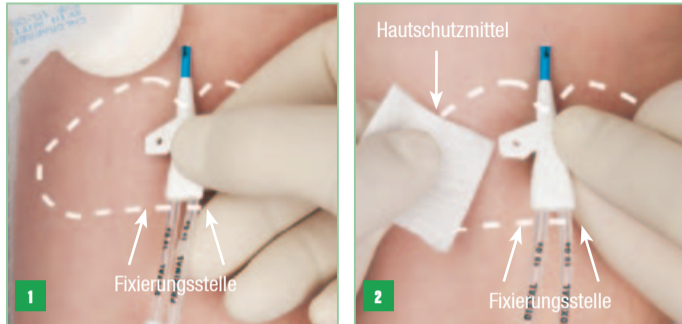

Hautschutzmittel

Fixierungsstelle

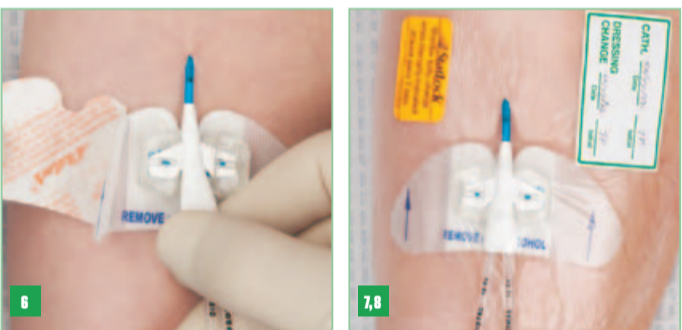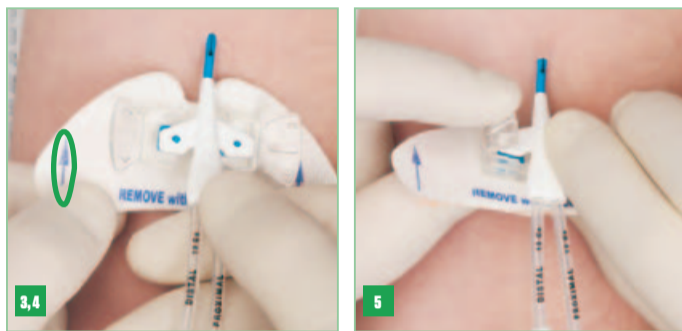

Fixierter Katheter

### Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**



### Ankoppeln

3. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
4. **Version mit variablen Haltezapfen:**  
Erstes Nahtloch des Nahtflügels über dem ersten Haltezapfen platzieren, dann den Katheter mit dem Haltezapfen verschieben, um den zweiten Haltezapfen einzufangen.  
**Version mit fixierten Haltezapfen:**  
Die Nahtlöcher des Nahtflügels über den fixierten Haltezapfen platzieren.
5. Das Pflaster von unten unterstützen und die Türen der Halterung schließen.

### Abziehen & Anbringen

6. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen. Dann auf der Haut anbringen.
7. Transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.
8. Beiliegendes Label anbringen.

## Vorgehensweise zur Entfernung

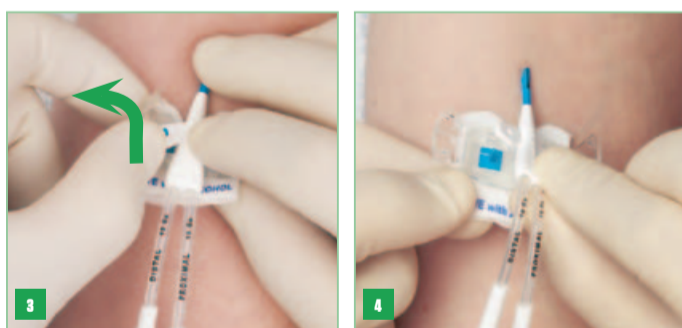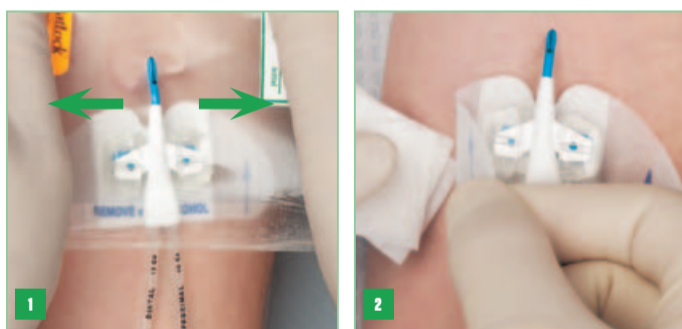

### Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

### Entkoppeln

3. Pflaster nach unten falten.
4. Den Katheter mit dem Finger stabilisieren, während das STATLOCK® Stabilisierungssystem gehalten wird. Als nächstes, wie gezeigt, mit dem Daumen der zweiten Hand die Tür der Halterung vorsichtig öffnen. **Die Hände neu positionieren und den Vorgang mit der zweiten Tür wiederholen.**
5. PICC vorsichtig aus der Halterung herausnehmen. Ein neues STATLOCK® PICC Plus Stabilisierungssystem anbringen oder den PICC entfernen.

**C. R. Bard GmbH**  
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

**Bard Medica S.A.**  
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

**Bard Medica S.A.**  
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.  
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0200-D (07/2014)

STATLOCK® Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. STATLOCK® Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.  
STATLOCK® Vorrichtungen sind steril & latexfrei.

**BARD | MEDICAL**