


Hinweis: Während der Pflege von zentralvenösen Zugängen und dem Anbringen oder Entfernen von StatLock* Stabilisierungssystemen wird immer empfohlen:

1. Patient horizontal lagern.
2. Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um Zugkräfte auf den Katheter zu reduzieren.
3. Bei der Erstanlage einen sterilen Klebestreifen an oder nahe der Eintrittsstelle anbringen.

Vorgehensweise zur Anbringung

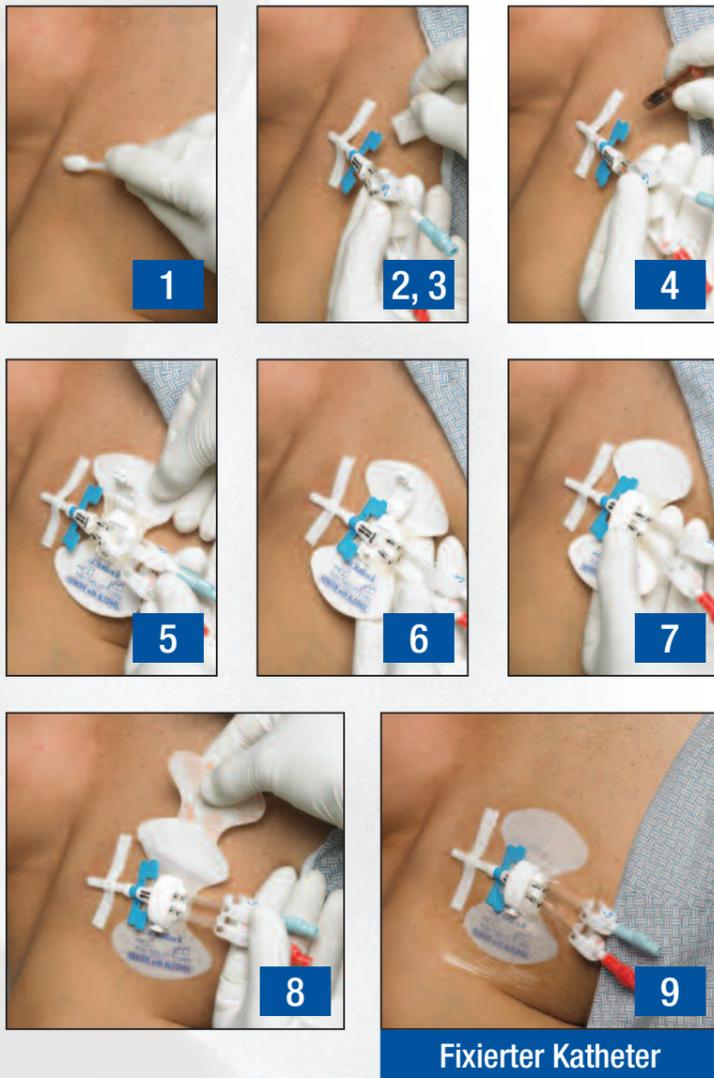

Fixierter Katheter

Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep* Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Katheter platzieren und entsprechend der Gebrauchsanleitung des Herstellers vorgehen.
3. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**
4. Danach Benzoin-Tinktur aufbringen. **Trocknen lassen bis „trocken haftend“.**


Ankoppeln

5. Den Katheter stets in der StatLock* Halterung sichern, **bevor** das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.
6. Die Bifurkation des Katheters in die Halterung des StatLock* Stabilisierungssystems einlegen.
7. Den Deckel schließen.

Abziehen & Anbringen

8. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen und auf der Haut anbringen.
9. Einen transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.

Vorgehensweise zur Entfernung

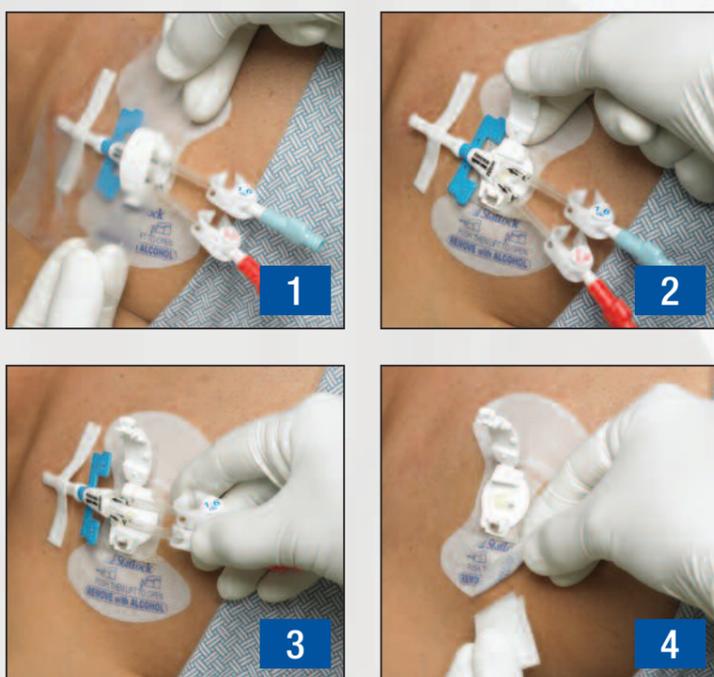

Bevor das StatLock* Stabilisierungssystem gewechselt wird, immer einen sterilen Klebestreifen bei oder nahe der Katheter-eintrittsstelle anbringen.

Entkoppeln

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Die Halterung durch Drücken und Anheben des Freigabeknopfes mit dem Daumen öffnen.
3. Den Katheter vorsichtig aus der Halterung herausheben.

Entfernen

4. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

StatLock* Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock* Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

StatLock* Vorrichtungen sind steril und latexfrei.