
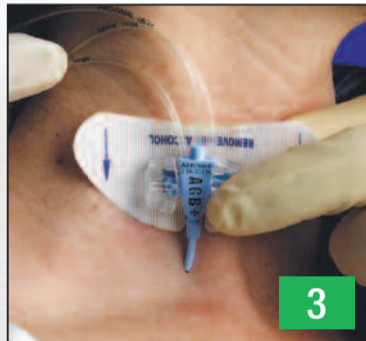
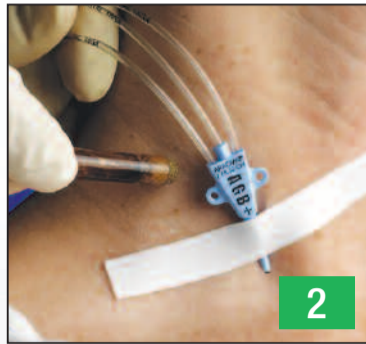


Vorgehensweise zur Anbringung

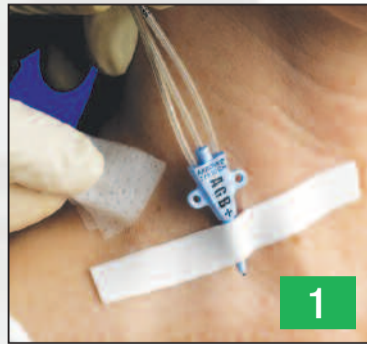

Fixierter Katheter

Den Katheter entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers platzieren.

Abwischen

1. Bereiten Sie die Fixierungsstelle mit ChloroPrep[®] Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll vor, um die Haut zu entfetten.
2. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).** Danach Benzoin-Tinktur aufbringen. **Trocknen lassen bis „trocken haftend“.**

Ankoppeln

3. Das StatLock[®] Stabilisierungssystem unter den Nahtflügel des Katheters schieben und die Nahtlöcher über den Haltezapfen platzieren. Die Türen der Plastikhalterung nacheinander schließen.

HINWEIS: Den Katheter stets in der StatLock[®] Halterung sichern, bevor das Stabilisierungspflaster auf die Haut geklebt wird.

Abziehen & Anbringen

4. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen.
5. Auf der Haut anbringen. Wenn verfügbar das Haltekissen für die externen Schenkel verwenden, um die baumelnden Anschlüsse zu fixieren.

Falls noch nicht geschehen, einen transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.

Vorgehensweise zur Entfernung



HINWEIS: Bevor das StatLock[®] Stabilisierungssystem entfernt wird immer einen sterilen Klebestreifen bei oder nahe der Kathetereintrittsstelle anbringen.

Entkoppeln

1. Den Katheter durch vorsichtiges, nacheinander Öffnen der Plastiktüren entkoppeln.
2. Wenn zweckdienlich, den Katheter vorsichtig aus der Halterung herausnehmen.

Entfernen

3. Das Stabilisierungspflaster entfernen indem eine großzügige Menge Alkohol verwendet wird, um eine Ecke des Pflasters zu lösen. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

StatLock[®] Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock[®] Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

StatLock[®] Vorrichtungen sind steril und latexfrei.