


Entwickelt, um das Ansatzstück von kompatiblen IV Kathetern zu fixieren.

## Vorgehensweise zur Anbringung

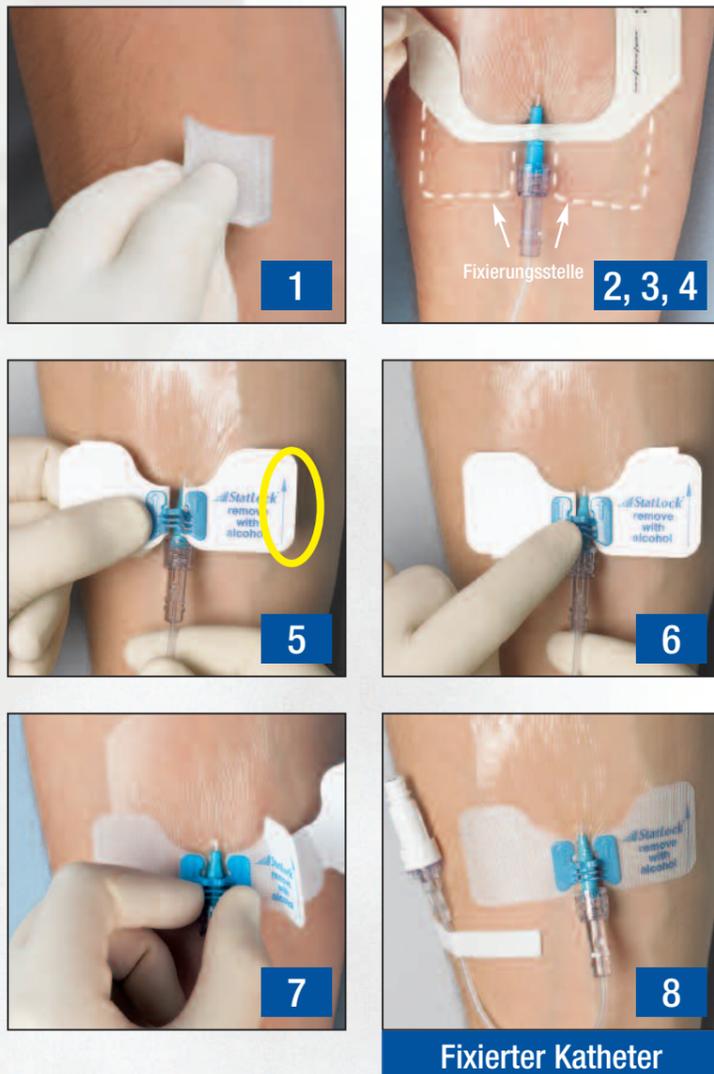

Fixierter Katheter

### Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep<sup>®</sup> Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten.  
**Vollständig trocknen lassen.**
2. Katheter platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Sicherstellen, dass das Plastikstück am Katheteransatz nach oben zeigt. Danach den transparenten Verband über der Eintrittsstelle bis zum Plastikstück am Katheteransatz anbringen. **Das Plastikstück nicht mit dem transparenten Verband abdecken.**
4. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen.  
**Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden). Hautschutzmittel nicht über dem transparenten Verband anwenden.**


### Ankoppeln

5. Das StatLock<sup>®</sup> Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
6. Das StatLock<sup>®</sup> Stabilisierungssystem über den Katheteransatz drücken, damit es das Plastikstück aufnimmt.

### Abziehen & Anbringen

7. Die Halterung des StatLock<sup>®</sup> Stabilisierungssystems fixieren, während die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abgezogen werden. Dann auf der Haut anbringen.
8. Optional: Einen sterilen Klebestreifen so über dem Schlauch des Verlängerungssets anbringen, dass ein J-Bogen geformt wird.

## Vorgehensweise zur Entfernung

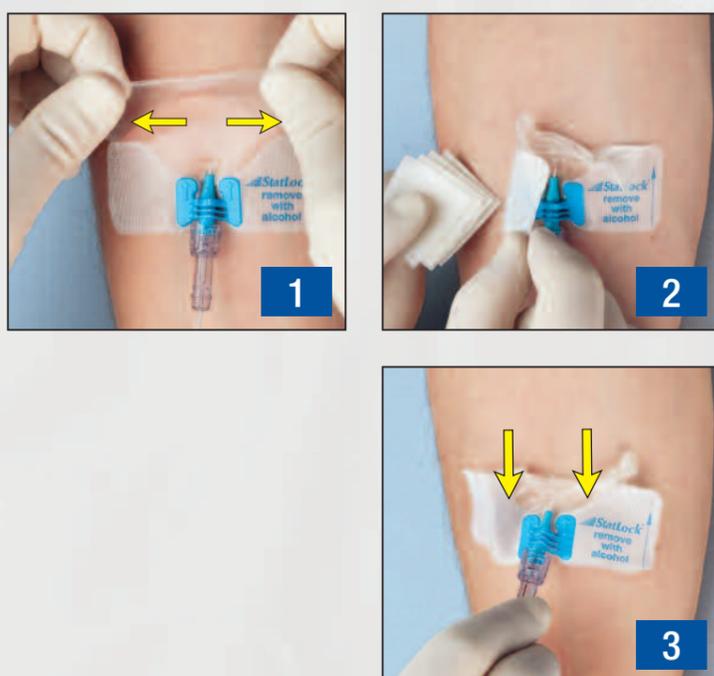

### Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik bis zum StatLock<sup>®</sup> Pflaster entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.  
**Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

### Entkoppeln

3. IV Katheter entfernen.

StatLock<sup>®</sup> Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock<sup>®</sup> Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

StatLock<sup>®</sup> Vorrichtungen sind steril und latexfrei.