


Entwickelt, um den Luer-Lock Ansatz von kompatiblen IV Verlängerungssets zu fixieren.

Vorgehensweise zur Anbringung

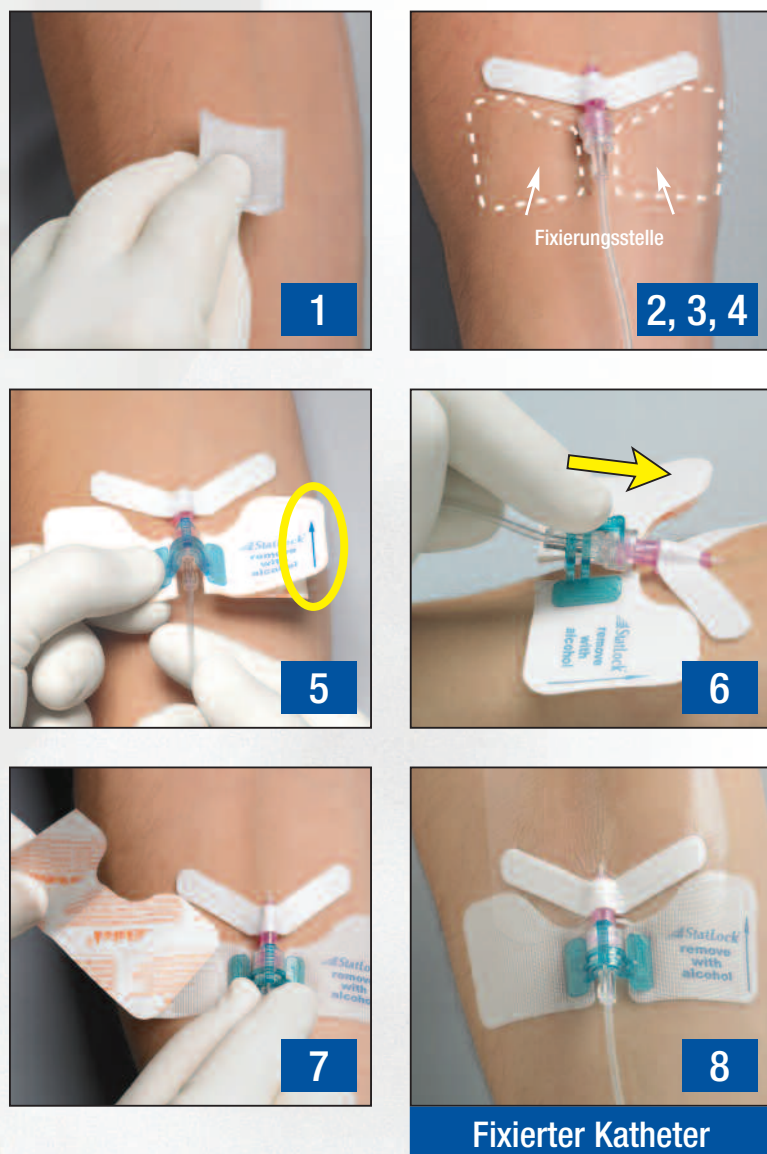

Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep* Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten.
Vollständig trocknen lassen.
2. Katheter platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Sterilen Klebestreifen und/oder transparenten Verband anbringen, um den Katheter zu stabilisieren.
4. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen.
Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).


Ankoppeln

5. Das StatLock* Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt. Das StatLock* Stabilisierungssystem über den Luer-Lock Ansatz des Verlängerungssets drücken, dabei gleichzeitig das Verlängerungsset von unten unterstützen.
6. Sicherstellen, dass der Arm der Halterung über das Ende des Luer-Lock Ansatzes reicht und diesen umschließt. Sollte dies noch nicht der Fall sein, die Halterung nach vorne schieben, bis sie in der richtigen Position einrastet.

Abziehen & Anbringen

7. Die Halterung des StatLock* Stabilisierungssystems fixieren, während die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abgezogen werden. Dann auf der Haut anbringen.
8. Wenn noch nicht geschehen, einen transparenten Verband entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.

Vorgehensweise zur Entfernung

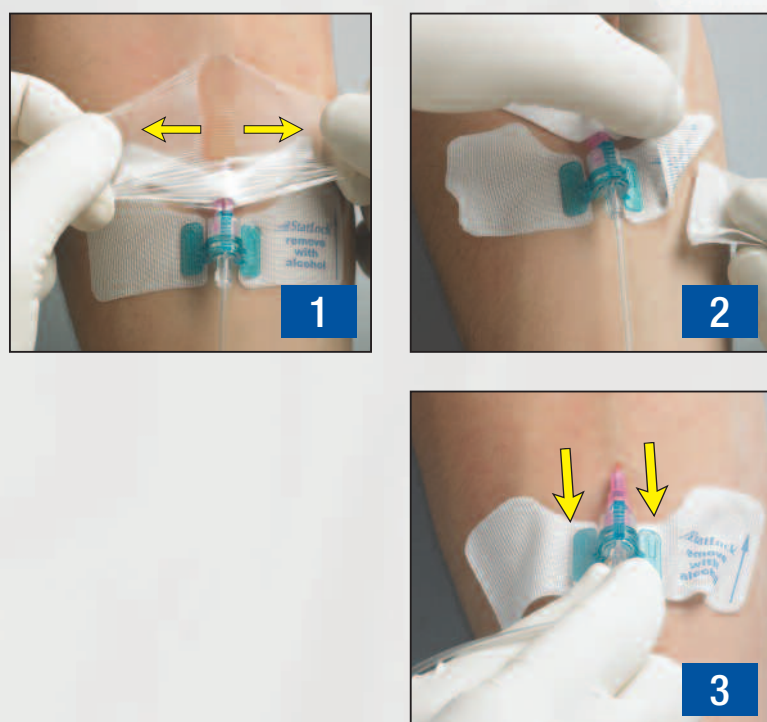

Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.
Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.

Entkoppeln

3. IV Katheter entfernen.

StatLock* Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock* Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebepflaster oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

StatLock* Vorrichtungen sind steril und latexfrei.