


für BBraun, BD und Smiths Medical Venenverweilkanülen

Vorgehensweise zur Anbringung

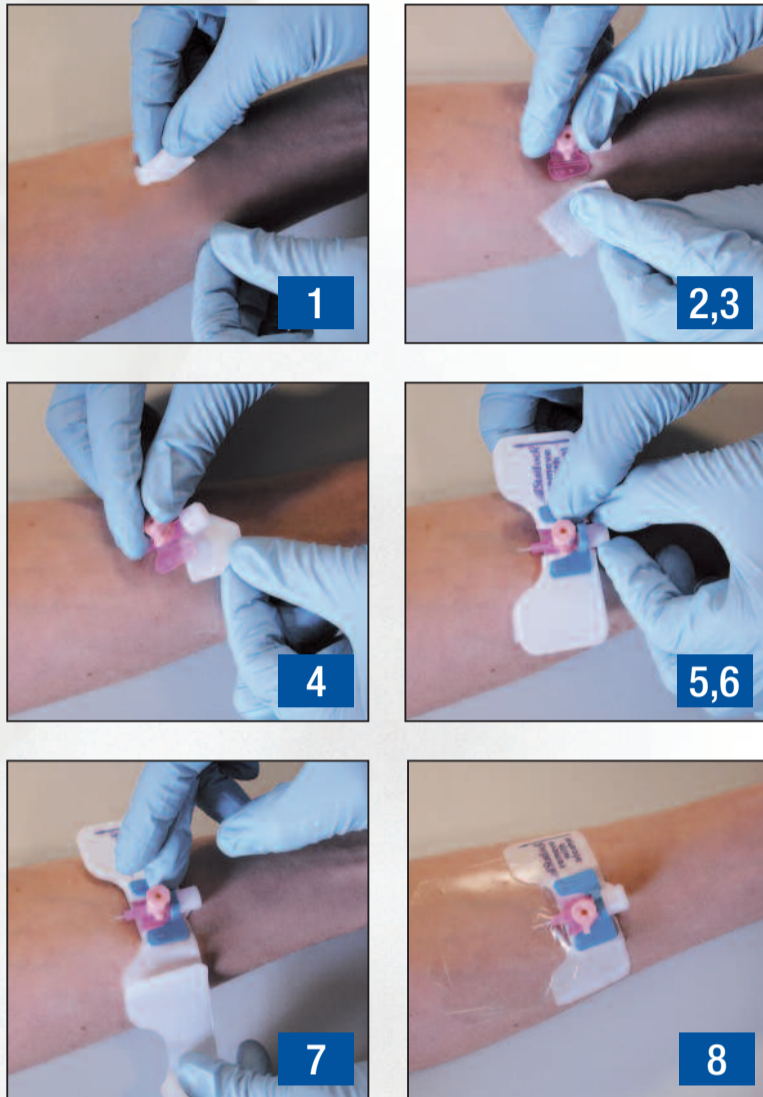

Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit CHLORAPREP® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen.
Vollständig trocknen lassen!
2. Venenverweilkanüle platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen.
Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).


Ankoppeln

4. Nachdem das Hautschutzmittel angetrocknet ist Schutzfolie entfernen und weißes Schaumstoffkissen unter dem Flügel und Luer-Ansatz platzieren.
5. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass die Pfeile zur Eintrittsstelle zeigen. Die Halterung des STATLOCK® Stabilisierungssystems über den Konnektoransatz der Venenverweilkanüle drücken und zwischen Injektionsport und Luer-Ansatz platzieren. Dabei gleichzeitig das Verlängerungsset von unten unterstützen.
6. Sicherstellen, dass die Halterung direkt hinter dem Luer-Lock sitzt, damit die Venenverweilkanüle richtig gesichert ist.

Abziehen & Anbringen

7. Die Halterung des STATLOCK® Systems festhalten und die Papierschicht auf der Rückseite abziehen. Dann auf der Haut anbringen.
8. Einen transparenten Verband über der Punktionsstelle anbringen.

Vorgehensweise zur Entfernung

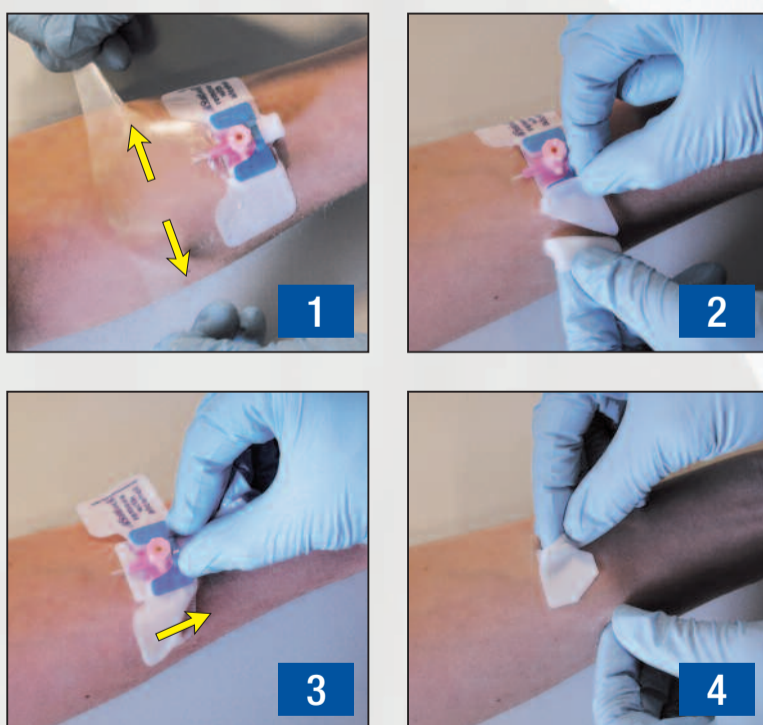

Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen.
Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.

Entkoppeln

3. Venenverweilkanüle entfernen.
4. Unter Verwendung von Alkoholtupfern auf die Unterseite des Schaumstoffkissens entlang streichen, um es von der Haut zu entfernen.

StatLock® Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. StatLock® Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Pflaster oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.
StatLock® Systeme sind steril und latexfrei.