

## Bestellinformationen

NIAGARA™ SLIM-CATH™ Akut Hämodialyse Katheter, zweilumig			
Typ	O.D. [F]	Einführlänge [cm]	Bestell-Nr.
Katheter	gerade	12	15 5551150
		20	5551200
		24	5551240
Kit	gerade	12	15 5553150
		20	5553200
		24	5553240
Katheter	gebogen	12	12,5 5552120
		15	5552150
		20	5552200
Kit	gebogen	12	12,5 5554120
		15	5554150
		20	5554200

Verpackungseinheit: 5 Stück

NIAGARA™ Akut Hämodialyse Katheter, zweilumig			
Typ	O.D. [F]	Einführlänge [cm]	Bestell-Nr.
Katheter	gerade	13,5	15 5591150
		20	5591200
		24	5591240
Kit	gerade	13,5	15 5593150
		20	5593200
		24	5593240
Katheter	gebogen	13,5	12,5 5592120
		15	5592150
		20	5592200
Kit	gebogen	13,5	12,5 5594120
		15	5594150
		20	5594200

Verpackungseinheit: 5 Stück

## Katheter-Komponenten

NIAGARA™ und NIAGARA™ SLIM-CATH™ Akut Hämodialyse Katheter enthalten:

- 1 NIAGARA™/NIAGARA™ SLIM-CATH™ Katheter
- 1 11-13 F DUALATOR™ Gefäßdilator
- 1 12-14 F DUALATOR™ Gefäßdilator\*
- 1 Heparin Etikett
- 2 Injektionskappen
- 1 abnehmbarer Nahtflügel

## Set-Komponenten

NIAGARA™ und NIAGARA™ SLIM-CATH™ Akut Hämodialyse Katheter-Kits enthalten:


- 1 NIAGARA™/NIAGARA™ SLIM-CATH™ Katheter
- 1 11-13 F DUALATOR™ Gefäßdilator
- 1 12-14 F DUALATOR™ Gefäßdilator\*
- 1 Punktionsnadel
- 1 Führungsdraht (70 cm x 0,038 inch) mit TRIGGER™ Drahtzuführungssystem, beidseitig (3 mm J-gebogen / gerade)
- 2 Klebeverbände
- 1 Heparin Etikett
- 2 Injektionskappen
- 1 abnehmbarer Nahtflügel

\* nicht mit SLIM-CATH™ Kathetern erhältlich

NIAGARA™ und NIAGARA™ SLIM-CATH™ Akut Hämodialyse Katheter werden idealerweise platziert unter Verwendung eines



Das in der Handhabung einfache und erschwingliche SITE-RITE® 5 Ultraschall System wurde entwickelt, um den Arzt bei der Platzierung von Vascular Access Produkten mittels Echtzeit Ultraschall zu unterstützen.

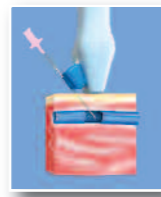

**BARD**

C. R. Bard GmbH

Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100

Bard Medica S.A.


Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70

Bard Medica S.A.


Thaliastraße 125a/1/5 • A-1160 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beleger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Niagara™  
Slim-Cath™ & Niagara™  
AKUT HÄMODIALYSE KATHETER

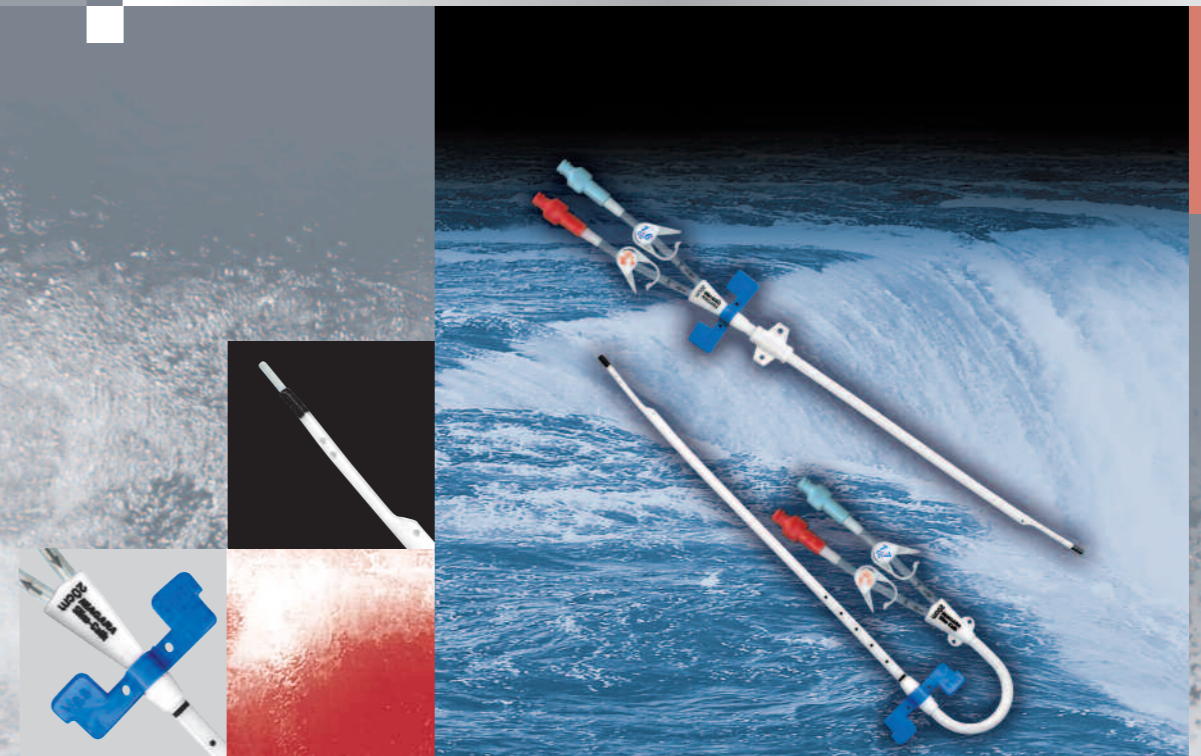

Den Bedürfnissen Ihrer Patienten entsprechen - mit einer Linie knickstabiler Akut Hämodialyse Katheter.

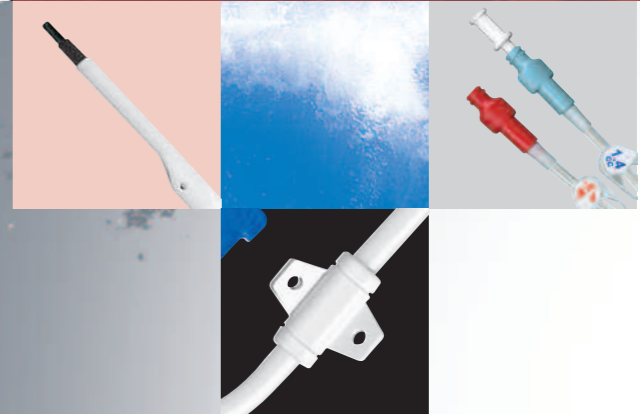

**BARD**

# Niagara™ Slim-Cath™ Akut Hämodialyse Katheter

## ■ Knickstabiles Design

NIAGARA™ SLIM-CATH™ Akut Hämodialyse Katheter mit knickstabilem Design ermöglichen Flussraten bis zu 300 ml/min bei einem venösen Druck von weniger als 250 mmHg. Der NIAGARA™ SLIM-CATH™ Akut Hämodialyse Katheter - die perfekte klinische Wahl.


Die geraden und vorgebogenen Katheter sind in unterschiedlichen Längen und unterschiedlichen Set Konfigurationen (Basis Set oder Kit) erhältlich.

- **Knickstabiles Katheter Design** widersteht Abknicken und bietet die notwendige Steifigkeit zum Platzieren.
- **Venöses Stylet** hilft den Katheter zu versteifen. Reduziert außerdem den Übergang von der Katheterspitze auf den Führungsdraht. Dadurch läßt sich der Katheter leichter einführen.
- **Abnehmbarer Nahtflügel** ermöglicht eine zusätzliche Sicherung des Katheters an der Eintrittsstelle.
- **Kleiner Durchmesser** 12 F Schaft ermöglicht Platzierung am Patientenbett.
- **3 cm gestaffelte Spitze** reduziert Rezirkulationsraten\* im Vergleich zu einer 2,5 cm gestaffelten Spitze.
- **Weiche Katheterspitze** konisch geformt für einen sanften Übergang zum venösen Stylet.

\*Daten vorhanden

## Katheterspezifikationen

NIAGARA™ SLIM-CATH™ Akut Hämodialyse Katheter					
Typ	O.D. [F]	I.D. arteriell/venös [mm]	Einführlänge [cm]	Füllvolumen arteriell/venös [ml]	Flügel-farbe
gerade	12	2,0 / 2,0	15	1,2 / 1,2	grün
			20	1,4 / 1,4	blau
			24	1,5 / 1,5	weiß
gebogen	12	2,0 / 2,0	12,5	1,4 / 1,4	rot
			15	1,5 / 1,5	grün
			20	1,7 / 1,7	blau

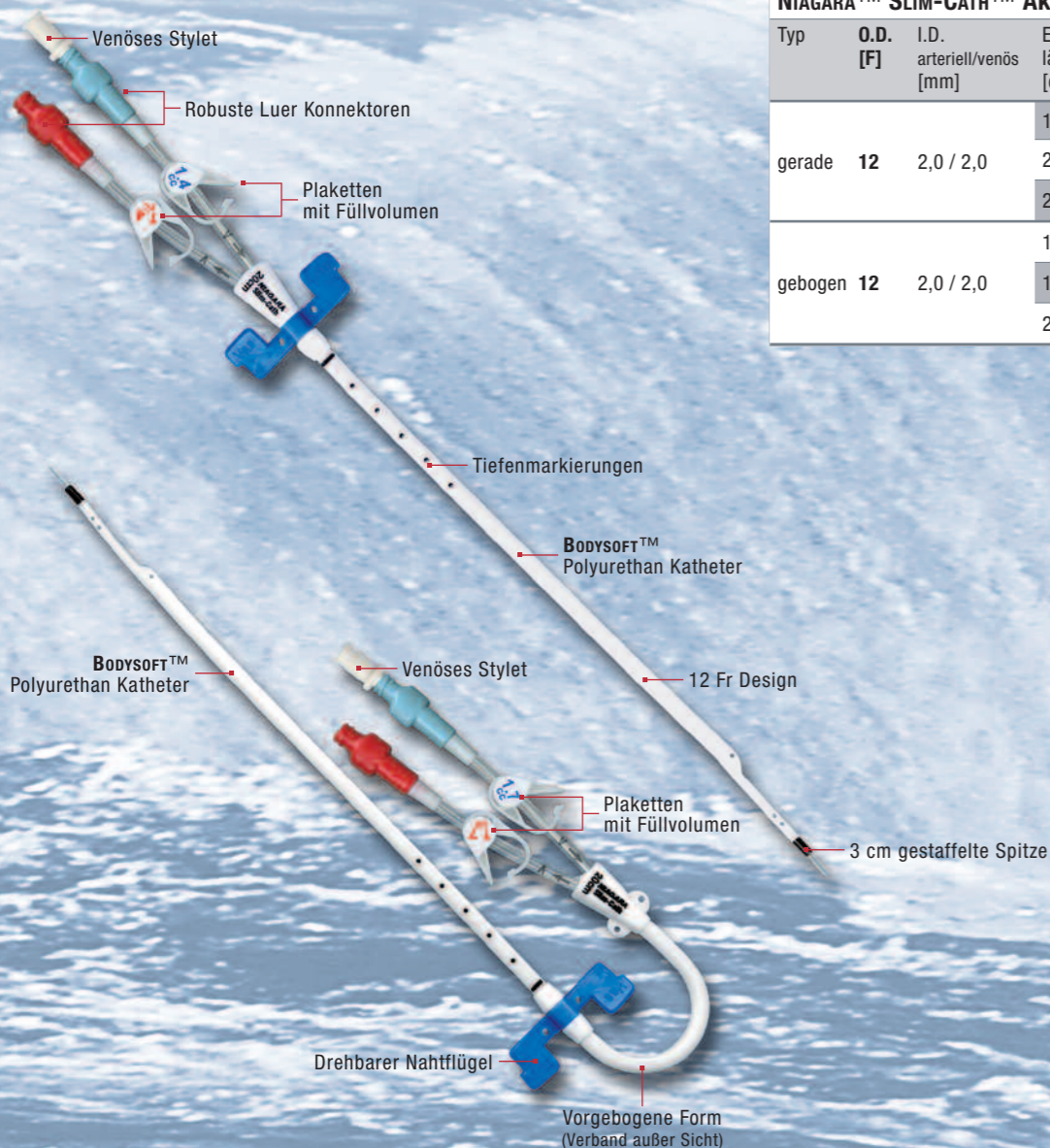

# Niagara™ Akut Hämodialyse Katheter

## ■ Hohe Flussleistung bei geringem venösen Druck

NIAGARA™ Akut Hämodialyse Katheter ermöglichen Flussraten bis zu 400 ml/min bei einem venösen Druck von weniger als 250 mmHg. Dadurch wird der NIAGARA™ Akut Hämodialyse Katheter zum Katheter für die ultimative Leistung.

- **Hohe Flussraten von 400 ml/min bei venösem Druck von weniger als 250 mmHg** ermöglicht eine effizientere Dialysebehandlung für den Patienten und macht den NIAGARA™ Katheter zur perfekten Wahl für die high-flow Dialyse.
- **Knickstabiles Katheter Design** ovales Design reduziert ein Abknicken.
- **Venöses Stylet** hilft den Katheter zu versteifen. Reduziert außerdem den Übergang von der Katheterspitze auf den Führungsdraht. Dadurch läßt sich der Katheter leichter einführen.
- **Weiche Katheterspitze** mit großer venöser Öffnung reduziert den venösen Druck, konisch geformt für einen sanften Übergang zum venösen Stylet.
- **Abnehmbarer Nahtflügel** ermöglicht eine zusätzliche Sicherung des Katheters an der Eintrittsstelle.

## Katheterspezifikationen

NIAGARA™ Akut Hämodialyse Katheter					
Typ	O.D. [F]	I.D. arteriell/venös [mm]	Einführlänge [cm]	Füllvolumen arteriell/venös [ml]	Flügel-farbe
gerade	13,5	2,2 / 2,2	15	1,3 / 1,5	grün
			20	1,5 / 1,6	blau
			24	1,7 / 1,8	weiß
gebogen	13,5	2,2 / 2,2	12,5	1,6 / 1,7	rot
			15	1,7 / 1,8	grün
			20	1,9 / 1,9	blau

