


# STATLOCK® Arterial

Stabilisierungssysteme

**StatLock®**  
STABILISIERUNGSSYSTEM

Entwickelt, um Arrow® Arterial 4020 Radialkatheter zu fixieren.

## Vorgehensweise zur Anbringung

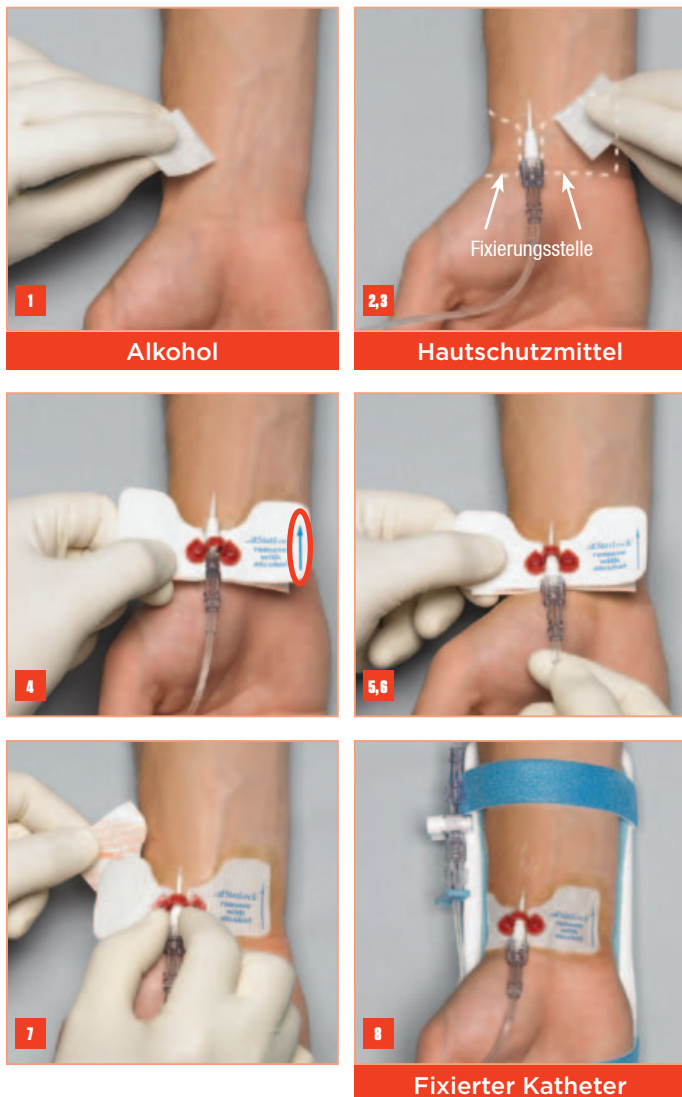

### Abwischen

1. Eintrittsstelle und Fixierungsstelle mit Chloraprep® Lösung, Alkohol oder entsprechend dem Krankenhausprotokoll reinigen und entfetten. **Vollständig trocknen lassen.**
2. Katheter platzieren und das Verlängerungsset entsprechend der Gebrauchsanweisung des Herstellers konnektieren.
3. Hautschutzmittel auf Fixierungsstelle aufbringen. **Vollständig trocknen lassen (10-15 Sekunden).**


### Ankoppeln

4. Das STATLOCK® Stabilisierungssystem so ausrichten, dass der Pfeil zur Eintrittsstelle zeigt.
5. Die rote STATLOCK® Halterung in die Einkerbung im Katheteransatz drücken, dabei das Verlängerungsset von unten unterstützen.
6. Den Katheter in der Halterung anpassen.

### Abziehen & Anbringen

7. Die beiden Seiten der Papierschicht auf der Rückseite nacheinander abziehen und auf der Haut anbringen.
8. Wenn noch nicht geschehen, einen transparenten Verband und eine Armschiene entsprechend dem Krankenhausprotokoll anbringen.

## Vorgehensweise zur Entfernung

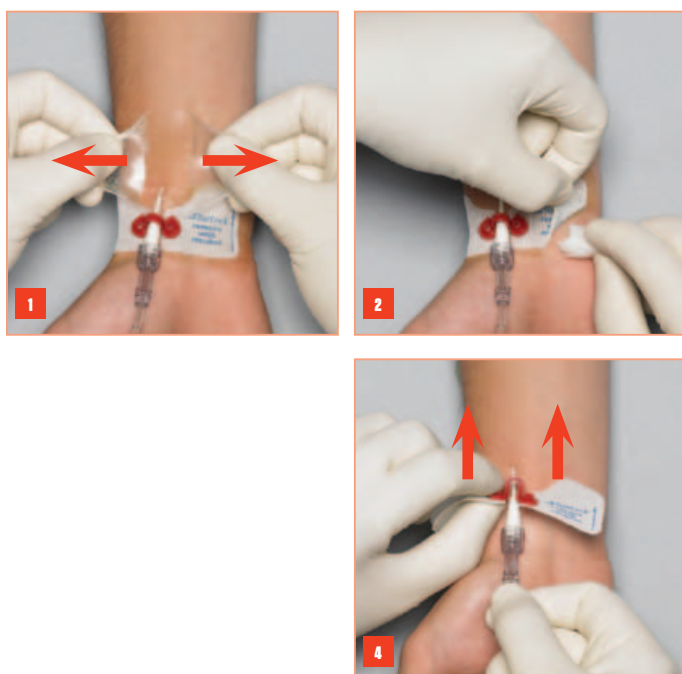

### Entfernen

1. Den transparenten Verband mittels Zugtechnik entfernen.
2. Zuerst eine Ecke des Stabilisierungspflasters unter Verwendung von 3-4 Alkoholtupfern anheben. Dann mit den Alkoholtupfern weiter auf der Unterseite des Pflasters entlang streichen, um das Klebepflaster von der Haut zu lösen. **Nicht an dem Pflaster ziehen oder das Pflaster mit Gewalt ablösen.**

### Entkoppeln

3. Zum Entkoppeln die Halterung vom Katheter abheben. Soll der Katheter entfernt werden, STATLOCK® Stabilisierungssystem und Katheter gleichzeitig entfernen.

**C. R. Bard GmbH**  
Wachhausstraße 6 • D-76227 Karlsruhe  
TEL: +49 721 9445-124 • FAX: +49 721 9445-100 • www.bard.de

**Bard Medica S.A.**  
MGC-Top Nr. D36, 3.OG Ebene • Modecenterstraße 22 • A-1030 Wien  
TEL: +43 1 49 49 130 • FAX: +43 1 49 49 130-30 • www.bard.at

**Bard Medica S.A.**  
Seestrasse 64 • CH-8942 Oberrieden/Zürich  
TEL: +41 44 722 53 60 • FAX: +41 44 722 53 70 • www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard und StatLock sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.  
Copyright © 2014 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. DACH-POS0210-D (07/2014)

STATLOCK® Systeme sind täglich zu inspizieren und bei Vorliegen einer entsprechenden klinischen Indikation, mindestens aber alle 7 Tage, zu wechseln. STATLOCK® Systeme sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Klebänder oder Haftmittel. Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.  
STATLOCK® Vorrichtungen sind steril & latexfrei.

**BARD | MEDICAL**